

Oticon ♦ Amigo



child
friendly
hearing
care

Kullanıcı dostu FM



oticon
PEOPLE FIRST

Amigo Sınıfın - içinde ve dışında - FM kolaylığı

Çocuklar gürültülü ortamlarda FM'e ihtiyaç duyar, fakat mevcut olan sistemler her zaman en iyi performansı vermez. Gerçekten etkili olması için, FM çözümleri basitçe programlanmalı, kolay kullanılmalı ve %100 güvenilir olmalıdır. Ayrıca konuşma sinyalinin anlaşılır olarak alınmış olmasını kesin olarak sağlamalıdır.

Oticon Amigo FM ailesi bu gereksinimlerin hepsini gerçekleştirmektedir. Amigo çözümleri piyasadaki diğer FM sistemlerinden daha iyi bir performans ve daha fazla rahatlık sözü verir.

Okulda ve evde kullanım için, çok amaçlı çözüm olarak Amigo T10 aşağıdaki özellikleri sunar:

- > > > > > **KESİNLİK:**
Çocuğun duyabildiğine dair tüm kuşkuları ortadan kaldırır.
- > **DAYANIKLIK:**
Düşmelerde daha az hasar
- > **İNSAN SESİNDE ÖNCELİK:**
Anlaşılır ve tutarlı konuşma sinyali
- > **UYGUNLUK:**
Programlama avcunuzda



Çok amaçlı Amigo verici



Çok kanallı Amigo alıcı





Amigo'ya KISA bir bakış

Amigo R2 ALICI

Amigo çok kanallı alıcı, bütün BTE işitme cihazları ile uyumludur ve Koklear İmplantlara da bağlanabilir.



LED durum göstergesi

Standart bağlantı yeri

3 konumlu düğme

Çevirme kilidi


Kanal arama düğmesi

- > Çok kanallı
- > Genel olan 2.0mA 'de düşük alıcı tüketimi
- > Alıcıda uyku modu

- > Programlama mesafesi yaklaşık 30 cm.
- > FM yayın mesafesi yaklaşık 30m.
- > Sesin gürültüye oranı (SNR): 50 dB

Amigo T10 VERİCİ

Amigo çok amaçlı verici, FM uygulaması ve kullanımı için, kolay ve dost bir arabirim sağlıyor.

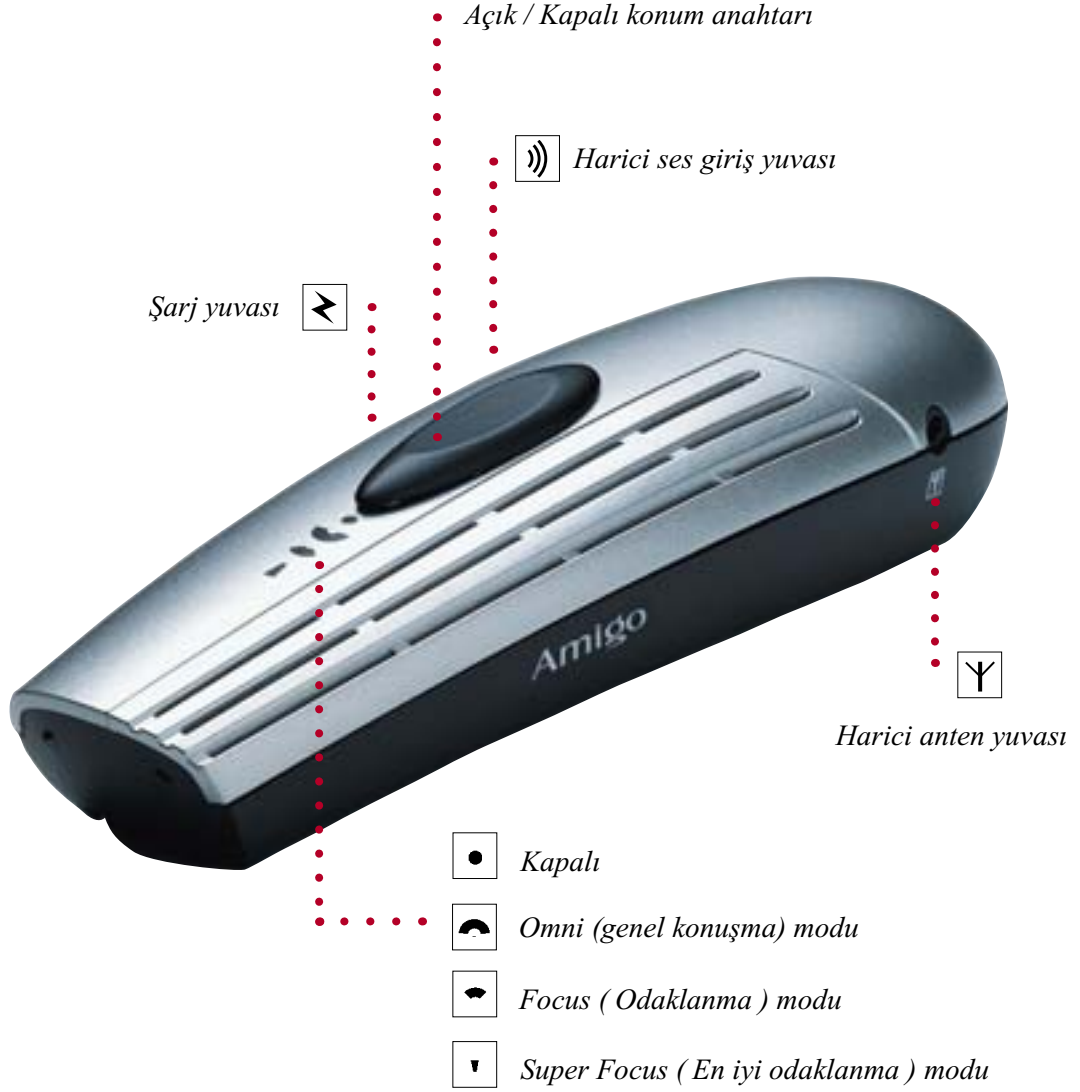

- > AAA standard NIMH piller
- > Güvenli şarj sensörü
- > Gerçek alçak frekans yön bulucusu
- > Saptanmış yönbulma değeri 8,5 dB AI -DI

- > Çok bantlı FM yeteneği
- > Kanal esnekliği sağlayan yapı
- > FM yayın alanı yaklaşık 30m.
- > Dört kullanım modu

Çocuğun duyabildiğini nasıl anlarsınız?

Çalıştığandan emin olamıyorsanız, FM teknolojisi ne kadar etkindir ?

Günümüz FM sistemlerin dezavantajı cihazın düzenli olarak çalışıp çalışmadığını veya çocuğun sinyali duyup duymadığını doğrulayıcı bir bilgi vermemesidir. Küçük çocuklardan öğretmene duymadığına dair cevap vermesi beklenemez; FM çözümü bunu kendisi yapmalıdır.

Amigo alıcısındaki Işık yayan eşsiz Diod (LED) tam olarak işte bunu yapar. Işık yandığında öğretmen sistemin çalıştığını ve çocuğun onu duyduğunu bilir. LED ışığının parlaması aşağıdakilerin varlığını kanıtlar :

- >
- >
- >
- >
- > **İşitme cihazı pili çalışıyor**
- > **Alıcı açık**
- > **Alıcı ve Vericinin her ikisinde mükemmel çalışıyor**
- > **Çocuk doğru kanalda**



Amigo görünen ışığı ile geribildirim sağlar

Sadece Amigo, çocuklarınızın ihtiyaç duyduklarını kazandıklarına dair, sizin kendinizden emin olmanızı sağlar.





Eşsiz kanal arama işlemi sayesinde verici ve alıcının aynı kanalda olmasını sağlıyor.

Amigo çocuğun DUYABİLDİĞİNİ nasıl GÖSTERİR ?

Genellikle küçük çocuklar FM sistemlerinin performansı hakkında doğru geri bildirim verme işini zor bulurlar. Fakat Oticon Amigo ile onlar bunu yapmak zorunda değiller. Eşsiz LED'i ve kanal bulma işlemi ile alıcı, çocuğun duyabildiğine dair açık bir kanıt sunar. Bu öğretmenlerin öğretime ve öğrencilerinde öğrenmeye odaklanmalarına izin verir.

FM çözümünün çalıştığını görmek

Amigo'nun kırmızı LED ışığı Amigo verici ve alıcının aynı anda aynı kanalda çalıştığını kanıtlar. Arkada veya öndeki pozisyonu onun her açıdan görünebilir olmasını sağlıyor. Bu LED ışık sürekli parlayacak veya iki saniyede bir yanıp sönecek şekilde programlanabilir. İstenirse tamamen kapatılabilir (Bu özellik daha gizli bir çözüm arayan, daha büyük öğrenciler için idealdir).

Amigo T10 vericiye, ona çok frekanslı olma yeteneği veren bir butona basarak frekans sentezi yapmasını sağlayabilirsiniz.

Amigo R2 alıcıdaki eşsiz kanal arama işlemi ile, T10 ve alıcının her zaman aynı kanalda olacağından emin olabilirsiniz.



Kırmızı LED bunları gösterir:

- > İşitme cihazı pili çalışıyor
- > Alıcı açık
- > Alıcı ve Vericinin her ikisinde mükemmel çalışıyor
- > Çocuk doğru kanalda



En iyi duymayı KESİNLEŞTİRMEK

Çocuğun alıcısını doğru kanal ayarında tutmayı kesinleştirmek için, Amigo alıcı en son kullanılan kanalda çalışmaya programlanabilir. Bu kaza ile kanal değişmesini önler.

Eğer gerekirse, vericinin bütün düğmeleri etkisiz hale getirilebilir, böylece işlem değişiklikleri sadece öğretmenin yardımı ile yapılabilecektir.



Amigo LED çok esnekler: Işık önden veya arkadan görülebilecek şekilde pozisyonu değiştirilebilir.

Kullanılmayan zaman, boşa geçen zamandır

Sınıflar duymak için güç ortamlardır. Neden FM çözümleri daha güçlü olmasın?

Sınıflar duymak için uğraştırıcı ortamlardır. Öğretmenler ve odyometristler aksaklık gidermede çok fazla zaman harcamak zorunda kalmamalı ve öğrenciler, FM sistemleri onarılrken beklemek zorunda kalmamalıdır. Öğretim zamanı, sistemin kullanılmadığı boşa harcanan zamanlardan çok daha değerlidir.

İstenen bu koşullar, Amigo için çok fazla değildir. Dış kabinden içindeki parçalara kadar Amigo şimdiye kadar yapılmış en güçlü FM çözümüdür.

- >
- >
- >
- >
- > **Kaza ile düşmelere karşı dayanıklı**
- > **Nem önleyici**
- > **Güvenli pil şarjı**



Biz Amigo'ya güveniyoruz - siz de güvenebilirsiniz!

Öğretmenlerin gerçekçi FM çözümlerine ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Amigo'ya çok fazla güveniyoruz, bu nedenle bütün ürünleri geri almak için, genişletilmiş bir garanti planı ile hazırız.





Amigo KULLANILMAYAN zaman kavramını GEÇMİŞTE bırakır

Sınıflar ve personel odaları FM sistemlerinde özel talepler gerektirir. Neyse ki, Amigo çözümleri içten ve dıştan olağanüstü korunmalıdır. Mekanik tasarımı

ve yapısı; olağanüstü pil verimi ve güvenli şarj sistemi, FM sistemi için, kullanılmayan zaman kavramını geçmişte bırakır.



- 1 Bu anahtar 100,000 defa kullanılmayı tolere edebilir ve bu yaklaşık 10 yıl kullanıma karşılık gelir.



- 1 Altın kaplama standart pin bağlantı yerlerinin aşınmaya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.
- 2 Ultrasonik olarak birleştirilmiş kabin tek parça gibi duruyor.



- 1 Hızlı ısı değişimi Amigo T10 'un ap larda üst safhada k özelliğine sahip ol

Darbelere DAYANIKLI

Amigo FM ürünleri kalıcı bir hasar oluşmadan kaza ile yere düşebilir. Amigo alıcısını son derece sağlam ve esnek kılan özellikleri; çok hafif ve ultrasonik kaynakla birleştirilmiş olmasıdır.

Nem KOVUCU

Dayanıklı son hali ile T10, uzun vadeli eğitim arkadaşınız olma sözü veriyor. Lastik kaplamalı butonu ve sağlam parlak yüzeyi onu nem kovucu ve aşınmaya karşı çok dayanıklı yapar. Amigo alıcısının da övünç kaynakları benzer şekilde neme karşı dayanıklı özellikleri; mevcut olan birkaç deliği sıkıca contalanmıştır ve kabini kaynakla birleştirilmiştir.

UZUN pil ömrü


Amigo alıcılarına uzun pil ömrünü sağlayan Uyku modu işlemidir. Ne zaman sinyaller arasında 60sn'den daha fazla zaman geçerse, alıcı küçük bir sinyal sensörü hariç, bütün işlemlerini durdurur. Bu prosedür pil tüketimini %50 den fazla azaltır. FM sinyalinin döndüğü anda bütün sistem yeniden çalışır ve LED ışığı bu değişikliği gösterir.

GÜVENLİ şarj

Amigo T10 şarjedilebilir AAA ve NiMH pillerini kullanır, ayrıca gerekirse bu piller standart Alkalini pillerle değiştirilebilir. Pil şarj etme denetleyicisi Alkalini pillerin kaza ile şarj edilmesini önler. Okul saatleri boyunca vericinin sürekli destek sağlamasını olanaklı kılar. Şarj edilebilen pillerin ömrü 8 saatten fazladır.



ve nem testi
balı ve açık mekan
karşı koyma
lduğunu kanıtlar.

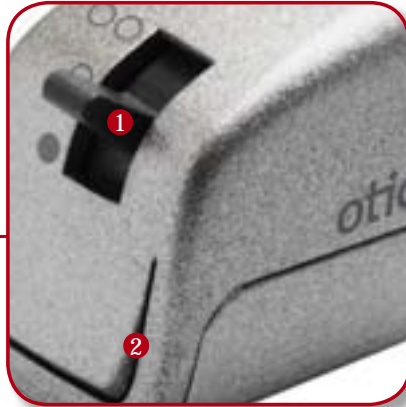

- 1 Üç konumlu anahtarı 10,000 defa hareket ettirilebilir.
- 2 Kanal arama düğmesi 50,000 defa kullanılmayı tolere eder.



- 1 Altın kaplama pil yayları paslanmaya karşı dayanıklı
- 2 Pil yayları pil tipini seçerek güvenli şarjı sağlar

Konuşmaya belirgin bir odaklanma

Sınıf çok gürültülü. Belirgin bir konuşma sinyalini çocuk sürekli nasıl kazanabilir?

Belirgin bir sesin anlamı sadece sesi A'dan B'ye göndermekten daha fazlasıdır; bunun anlamı sadece en önemli sesin çocuğa iletilmiş olmasıdır. Fakat sınıf ortamlarında yarışan gürültü kaynaklarından sırf gerekli olan sesi ayırıp almak çok zor olabilir.

Amigo, geliştirilmiş dört adet yönlü mikrofonun(sekiz adet mikrofona eşit) yardımı ile istenmeyen gürültüler içinden önemli olan sinyali seçer. Her biri çok güçlü olan bu mikrofonlarla donatılmış olan T10'un en önemli sinyali, piyasadaki diğer yönlü çözümlerden çok daha etkileyicidir.

Ayrıca T10 çok seçicidir: Odaklanma modunda doğrudan ve sadece "dinleme alanında" bulunan kişinin sesini alır ve elde tutar. Süper odaklanma modunda her zamankinden daha fazla önemsiz gürültüleri çocuğun dinleme alanının dışında tutar. Etkileyici bir 8,5dB AI-DI ile Amigo çok yüksek bir SNR sağlar ki bu çocukların gerçekten farkedeceği bir kazançtır.

> > > >

- > **Üstün nitelikte yönlü**
- > **Daha iyi konuşma girdisi**
- > **Daha iyi ses kalitesi**
- > **Çeşitli gürültü kaynaklarını eşzamanlı olarak baskılama**



Farklı gürültü kaynaklarından olan gürültüleri azaltmak

Eşsiz yönlü kalitesi sayesinde Amigo T10 eşzamanlı olarak çeşitli gürültüleri azaltır - gürültüler durgun olmadığında veya konuşmalar ayarlanmadığında





Omni konumda masaya yerleştirilmiş T10, çocuğun sınıf arkadaşlarının sesini yükseltir.


Amigo GÜRÜLTÜYÜ Nasıl YENER ?

Amigo'nun yön bulucu mikrofonları doğrudan karşısından gelen herhangi bir konuşmayı yakalar ve otomatik olarak yanlardan ve arkadan gelen gürültüye dikkat eder. Arzu edilen konuşma işaretlerini emniyete alarak çocuk tarafından duyulabilir olmalarını sağlamak için, T10 geliştirilmiş dijital ses işleme teknikleri uygular. Mükemmel ses kalitesi, devrenin iç çalışma gürültüsünü daha fazla azaltılarak garantiye alınmıştır, +55dB lik bir SNR değeri Amigo'yu dünyanın en gürültüsüz yön bulucu çözümü yapar.

Ders tahtasına daha fazla yönelmek

Amigo'nun (sekiz mikrofona eşdeğer)dört yön bulucu mikrofona donanımı, 8,5dB AI-DI imkanı sağlayan gelişmiş dijital işlemler hesaplaması ile birleştirilmiştir.

Daha yüksek yönbulma, konuşma sinyaline öncelik tanıyıp duymayı daha da kolaylaştırarak SNR değerini maksimuma çıkarır.

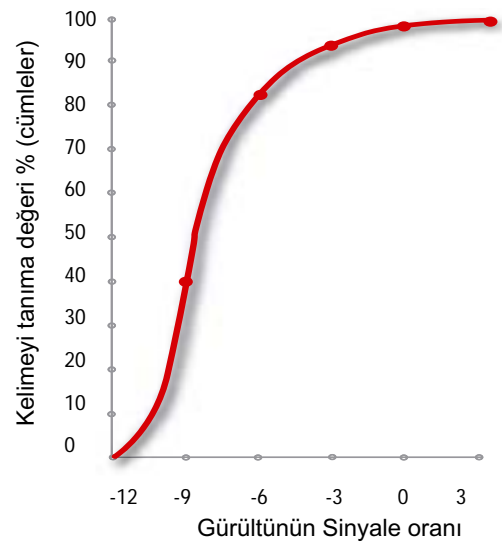


Artikülasyon indeksini hesaplamak için kolay bir yol. *İşitme dergisi, cilt:43 No:9, Eylül 1990 H. Gustav Mueller ve Mead Killian*

Daha fazla konuşma girdisi

Çocuğun konuşmaları anlama ve duyabilme yeteneğini maksimuma çıkartmak için, Amigo T10 konuşmalarda ve cümlelerin başlangıcında tam bir kavrama imkanı sağlar.

Daha yüksek yönbulma ayarlamalarını ve alçak frekanslardaki yanıtları sunmak için, Amigo dijital sinyal işlemleri kullanır. Diğer FM sistemleri geneleksen olarak alçak frekansları uzaklaştırırken T10 hiçbir sesi uzaklaştırmaz.

Korunmuş frekans yanıtları konuşma girdisini geliştirir, konuşmaların daha iyi anlaşılır olmasına izin verir, konuşmayı yapılandırır ve dil gelişimini sağlar.

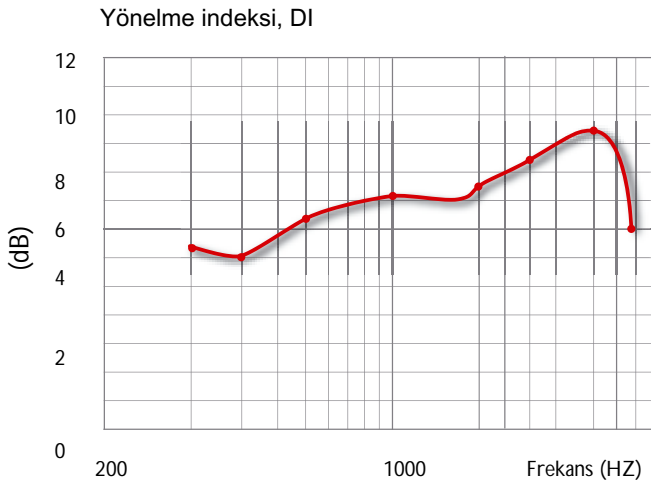

Amigo T10 yüksek ve alçak frekanslardaki konuşma girdilerine yüksek yönelme sağlıyor.

Çok üstün ses kalitesi

Amigo'nun alçak eşdeğerde gürültü girdi seviyesinin anlamı; çocuklar duymaya ihtiyaç duydukları sesleri çevre gürültüleri ile savaşmak zorunda kalmadan duyabilir. Bu Amigo alıcısının kazanç ayarlarındaki mutlak işlemdir.

Gürültüye bağlı en az dikkat dağılımı

Sınıf ortamında T10 önemsiz gürültüleri en az seviyede verir, çünkü kutupsal işaretlemeler sadece gerçekten önemli olan seslere odaklanması için tasarlanmıştır.

Üç çalışma modu

Amigo T10 vericisinin üç yön bulucu modu vardır: Omni, Focus ve Super Focus. Bu üç mod sadece bir düğme tarafından kontrol edilir. Bu özellik onun çocuklar, veliler ve öğretmenler tarafından kolayca kullanılmasını sağlıyor. Ek olarak T10 doğrudan TV, PC veya MP3 gibi bir ses vericisine bağlanabilir.

Programlama aleti avcunuzda

Neden FM programlamak daha çabuk ve kolay olmasın?

FM sistemlerini programlamak ve uygulamak kullanışsız ve zamana karşı dayanıksız olabilir. Kullanışsızdır çünkü birçok kablosu,yazılımı ve donanımı vardır. Ve zamana karşı dayanıksızdır çünkü kanal yönetimi ve onarımları birçok deneme ve hata içerir. Bunlar sizi donanım için daha fazla, öneri sunmaya ise en az zaman harcamaya zorlar.

Amigo, tüm programlama ve tanımlama imkanlarını avcunuzda size sunan tek FM çözümdür. Bunların hepsinin bir çözüm içinde olması sorunları hemen çözmenize yardımcı olur.

> > > >

- > **Bütün programlama işlemleri bir ünite içindedir bu nedenle başka bir donanım gerektirmez**
- > **Amigo programlama cihazı kablosuz olarak kulaktaki alıcıyı programlama imkanı sunar**
- > **Programa göre aktif olan kanal yönetimindeki FM kanal sihirbazı size kılavuzluk yapar.**



Güçlük yok. Karışıklıklarla zaman harcamak yok

Amigo programcısının gururu, programlama ve tanımlama özelliklerinin bolluğudur. Hepsi, yoğun olan günlük bir planda, zaman tasarrufu yapması için tasarlanmış, kullanımı kolay bir menüden seçilebilir.





Neden Amigo PROGRAMLAMA ve UYGULAMAK için KOLAYDIR ?

Amigo FM çözümleri çok geniş kullanıcı topluluğun ihtiyaçlarına uygun olmak için önceden programlanmıştır. Fakat, eğer alıcı ve vericiyi alışkanlığınıza göre ayarlama ihtiyacı duyarsanız, bu işlemleri çok kolay bulacaksınız. Bütün düzenlemeler ve programlamalar Amigo FM programcısı tarafından yapılacaktır.

İlk kullanımda doğru kazanım

Kanal yönetimi karmaşık olmak zorunda değildir: Amigo kanalların hepsi önceden programlanmıştır ve kanal yönetimi ile tanımlamasını son derece kolay hale getiren FM kanal sihirbazı içinde yapılandırılmıştır.

Kanal sihirbazı üç önemli şekilde yardımcı olur:

> Eşsiz Kanal Denetimi

Programcıya bağlanmış kulaklık ile belirli bir kanalda sinyal kalitesini denetleyebilirsiniz.

> Tarama ve Ana Kanalın Seçimi

Bu programcı parazitsiz kanallar listesi sunmak için çevreyi ve parazitleri tarayacaktır.

> Tarama ve Takım Eğitim Kanalının Seçimi

Programcı çevreyi parazit için tarayacak ve ana kanal ile ikincil takım eğitim kanallarını belirtecektir.



Alıcıları Ayarlamak - Canlı

Alıcıların canlı olarak ayarlanması okulda çocuğun kulda veya kliniğinizdeki test kutusunda yapılabilir. Bu özellikler, alıcı uygulamasındaki günümüzün sıkıcı denemeleri ve hatalı işlemlerini ortadan kaldırır. Bütün Amigo özellikleri farklı yaş gruplarına uygun olacak şekilde ayarlanabilir.

- > Küçük çocuklar kurcalamaya karşı yüksek seviyede dayanıklılığa ve sistem saydamlığına ihtiyaç duyacaktır.
- > Genç çocuklar sıklıkla en çok otomatik ayarları kullanacaktır (ASHAA standartların esasları ile +10dB FM kazancı)
- > Daha büyük çocuklar çeşitli fonksiyonları kendi elleri ile yapmak isteyecektir.



Tam Uyumluluk

CI: Amigo alıcıları Koklear İmplant ile uyum içinde çalışabilir.

BTE: Amigo alıcıları bütün kulak arkası işitme cihazları ile uyumludur

FM: Amigo FM çözümleri FM sistemleri ile uyumludur

Amigo

Sınıfta FM hiç bu kadar kolay olmamıştı !

Çocuklara öğrenmede ve öğretmenlere öğretmede yardımcı olur


Genel bir çözüm olarak T10 mükemmel bir seçenek iken, Amigo T20/T21 en son eğitim aracıdır. Sadece bir öğretmen ile okul öncesi bir sınıf için öğretim takımı hazırlığında standart bir düzen olarak kullanıldığında bu vericiler öğretimi ve öğrenmeyi çok daha kolay kılar. Ek olarak, T20 / T21 çocukları T10 elinde kullanamayacak kadar küçük olan aileler için idealdir.

Önsezili teknoloji, çocuklar için kristal netliğinde bir sinyal elde eden akıllı ses işleme tekniği ve sıkıntısız programlama ile uygulama sözü verir. Eşsiz yapısı sayesinde, Amigo sınıf ortamının en sert darbelerine karşı koyabilecek kadar dayanıklıdır, bu nedenle hafta içi ve hafta dışında gün boyu destek sağlar. Bu avantajlar aşağıdakileri içerir:



- > Kendi içinde Programlama
- > İdeal mikrofon seviyesi
- > Çeşitli insan seslerini dengeleme
- > Arka plan gürültüsünü azaltma
- > Otomatik sessiz fonksiyon

Amigo Takım Öğretimini destekler

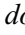Amigo T21 basit bir dokunma ile çalışan  butonu sayesinde Takım Öğretimini kolaylaştırıyor. Bu çözüm bölgesel kanal yönetim programlarına yer vermek için, tam bir kanal esnekliği sunar.






Amigo öğretmenleri ve çocukları nasıl DESTEKLER ?

Amigo T20 ve T21, yetersiz mikrofon konumunu otomatik olarak telafi eden kablosuz uygulama ve avuç içinde programlama imkanı ile öğretmeni destekler. Çocuğu desteklemek için Amigo, Akıllı İnsan Sesini Bulma ve Gürültü Yönetim sistemlerin yardımı ile sinyali kişiye göre uyarlar. Ve konuşma olmadığında, Amigo otomatik olarak sessiz konuma geçerek ses kalitesini konforlu olacak şekilde korur. Bu nedenle öğretmenler, öğrencilerinin her zaman, sırası ile dil eğitimini, akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları uyarıları alacaklarından emin olabilirler.

Doğrudan Program VERİCİ

Programlama modunda verici profesyoneller için tam bir FM donanım aracı sağlar. Ayarlama kablosuz-

yapılır - kablo veya diğer bir teçhizata ihtiyaç yoktur. Okul ve sınıf bilgilerini girmek sureti ile vericiyi kullanacak kişiye göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Takım Öğretimi, kişisel FM kanalları ve geliştirilmiş ses işlemleri gibi karmaşık fonksiyonları iptal edebilirsiniz.

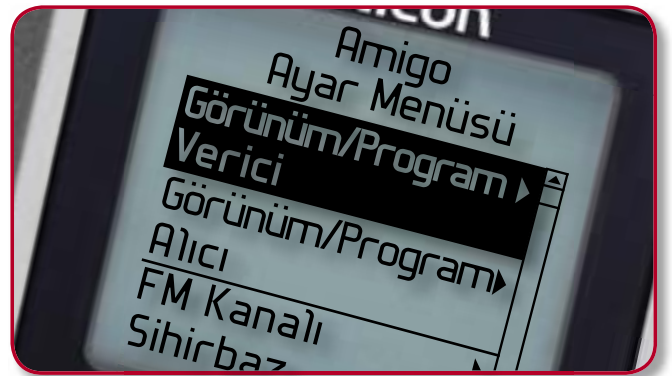


İdeal mikrofon seviyesi

Amigo ayrıca, 'ideali' dışındaki diğer yerlerde bulunan mikrofonlar tarafından kaynaklanan çeşitli seviyelerdeki sinyalleri de karşılamaktadır. Bu nedenle mikrofonun öğretmenin üzerinde hangi pozisyonda olduğu sorun olmadan, sinyal anlaşılır olarak iletilecektir.



Çeşitli İnsan seslerini Dengelemek

Amigo çocuğun ihtiyacını karşılamak için çıkış seviyesini gösterir. Sinyalin konforlu ve istikrarlı olmasını sağlamak için, Amigo öğretmenin sesinin enerjik, canlı veya sessiz, sakin olmasına göre ayarlamalar yapmaktadır.

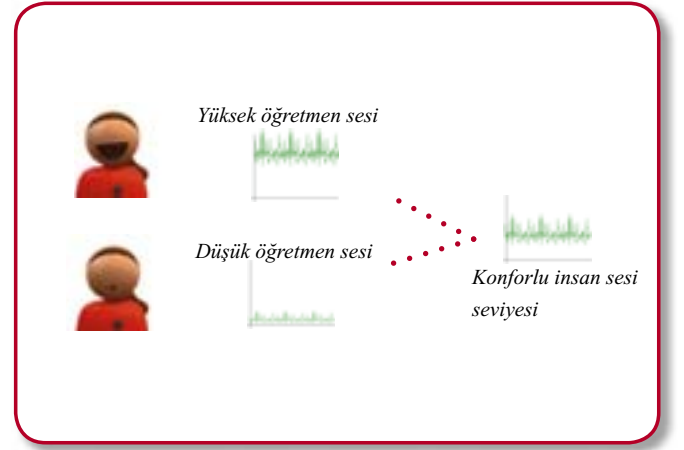

Arka plan gürültüsünü azaltmak

Amigo konuşma ve gürültünün varlığı için, ses sinyalini analiz eder. Her ne zaman konuşma ve gürültünün harmonisi ve modülasyon örnekleri görünse, Amigo aniden onlara dikkat edip odaklanacaktır. Bu strateji konuşma sinyalini, en fazla anlaşılır olması için, bütünlüğünü korur. Amigo ile öğretmenler, trafik sesleri veya gürültülü ısıtma ve soğutma sistemlerin sesleri ile yarışmak zorunda kalmayacak, çünkü bütün bu gürültüler yavaşça azaltılmış olacak.

Sadece önemli olanı İLETİR

Amigo kararlı olarak konuşmanın varlığı için tarama yapar ve eğer konuşma yoksa, çocuk kağıt hışırtılarını veya diğer küçük ve önemsiz gürültüleri dinlemek zorunda kalmaması için, otomatik olarak mikrofon sinyalini durdurur. Bu onların derse odaklanmalarını ve katılmalarını daha kolay hale getirir.



Konuşma olmadığında verici kendiliğinden sessiz olur

Çocukların potansiyellerini kullanmalarını kolaylaştırır

Çocuklar dünyayı keşfetmek için, onların becerilerini mükemmelleştiren ve tüm potansiyellerini kazandıran her fırsatı hak eder. Bu amaçların takibinde, onlara düşkün olan velileri, odyometristleri ve öğretmenleri yardımcı olur. Bu konuya adanmış ilgili kişilerde sahip olabilecekleri her türlü desteği hak eder.

Dikkatli bir yardımcı

Oticon, çocuklara dost akıllı işitme çözümleri geliştirerek katkıda bulunur. Çocuk ve ailenin ihtiyaçları bizim buluşlarımızı sürdürür. Çözümlerimiz olabildikçe gelişmiş olsa bile onlar ayrıca pratik ve özelliikle kullanımı kolaydır.

Teknoloji, çocuklarla ilgili çözümlerin sadece bir parçasıdır. Bizim hedefimiz insanlara ihtiyaç duydukları araç gereç desteğini vermek ve çocukların yaşa bağlı gelişimini olabildikçe ödüllendirmek ve ilgili oldukları konularda verimli olmalarını sağlamaktır.

Bu nedenle “*Çocukla dost işitme ilgisi*” her şeydir !



www.oticon.com

adresini ziyaret edin. Ziyaretçiler FM dünyasını anlatan konuyu inceleyebilir.



Amigo Ailesini Tanıyın

Oticon Amigo T20

Amigo T20 sınıflarda kullanmak için vücutta taşınan bir vericidir. Bu verici ayrıca özel bir menü ile programlama ve ayarlama ünitesi olarak çalışır.



Oticon Amigo T21

Amigo T21 verici, T20 ile aynı işlemleri sunmakla birlikte ek olarak Grup Eğitimi işlemini de sunmaktadır.



Oticon Amigo R1

Amigo R1 standart çok kanallı bir alıcıdır, genel bir standart pin bağlantısı ile değişik firmalar tarafından üretilmiş neredeyse tüm kulak arkası işitme cihazı ve Koklear İmplant modelleri ile kullanılabilir.



Oticon Amigo R2

Amigo R2, R1'in bütün işlemlerini sunmakla birlikte ek olarak elle kanal arama imkanı sunar.



Oticon Amigo R7

Amigo R7 SUMO işitme cihazları için yapılmış özel bir alıcıdır. Bu alıcı, R2 alıcısındaki özelliklerin aynısını sunar.



Oticon Amigo T10

Amigo T10 vericisi, sınıf içinde ve dışında kullanılabilen çok amaçlı bir vericidir.



Oticon Amigo WRP

Amigo Kablosuz Alıcı Programlayıcısı (WRP) bütün Amigo alıcılarını kablosuz ayarlama imkanı sunar. Ek olarak programa göre aktif olan kanal yönetimi için FM kanal sihirbazını sunar.



Amigo mikrofon opsiyonları

Amigo yüksek kalitede bir omni-lapel mikrofon ile gelir. Buna ek olarak üç tipte opsiyonel mikrofon imkanı sunar - hepsi mikrofon kablosu içinde tasarlanmış bir dış anten ile birlikte:

- Lavalier mikrofon
- Yön bulucu lapel mikrofon
- Boom mikrofon



Oticon Amigo FM-CI

Amigo FM - CI adaptörü vücutta taşınan Koklear İmplant işlemcisi ile tam uyum sağlar.



People first



Biz, en iyi işitme cihazlarını yaratmak için, teknolojiden ve odyolojiden daha fazlasına ihtiyaç olduğuna inanırız. Bu nedenle, işitme ile ilgili yeni bir çözüm geliştirirken, işitme kayıplı kişilerin, kişisel ihtiyaçlarını ve arzularını öncelik sıramızın en başına koyuyoruz.