

# Oticon ♦ Amigo

## KULLANIM KILAVUZU

### Amigo eZync



child  
friendly  
hearing  
care

oticon  
PAEDIATRICS

## ÖNEMLİ NOT

Amigo eZync'i kullanmadan önce bu kitabın içeriğini dikkatlice okuyunuz. Kitapçık Amigo eZync'in kullanımı, bakımı, güvenlik bilgilerini de içeren bir çok durumu kapsamaktadır.

## İçindekiler

Giriş	4
Standart paket içeriği	5
Amigo eZync'i hazırlamak	6
Amigo eZync'e güç sağlamak	7
Amigo eZync nereye yerleştirilmelidir?	8
Amigo eZync'i duvara asmak	10
Amigo eZync'i rafa yerleştirmek	13
LED hakkında	14
Kanal seçimi ve değiştirilmesi	15
Amigo eZync'i senkronize etmek	16
Diğer üreticilere ait alıcıları senkronize etmek	17
Amigo eZync'i temizlemek	18
Ek A: Sorun Giderme	19
Ek B: Üretici Garantisi	20
Uyarılar	Sarı Sayfalar

## Giriş

Sınıf FM sisteminizi daha da iyi hale getirmek için attığınız bu yeni adımdan dolayı sizi tebrik ederiz.

Amigo eZync Oticon tarafından üretilen hem okul hemde ev sistemlerine yüksek kaliteli benzersiz çözümler üreten Amigo FM ürün ailesinin üyesidir.

Amigo ailesi hem profesyonel, hem akademik hem de sosyal alanlarda dinlemenizi kolaylaştıran çok yönlü ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Amigo eZync ile okullarda kanal yönetimi de çok daha kolay yönetilir hale gelmiştir.

Amigo eZync okulun veya kurumun ihtiyaçlarına göre kolayca duvara veya rafa yerleştirilebilir.

## Standart paket içeriği



Duvar askısı



Güç kaynağı  
Model: UE10W-050020SPC



Amigo eZync



Dübel ve vida




Kullanım Kılavuzu



eZync'i rafa yerleştirmek için destek

## Amigo eZync'i hazırlamak

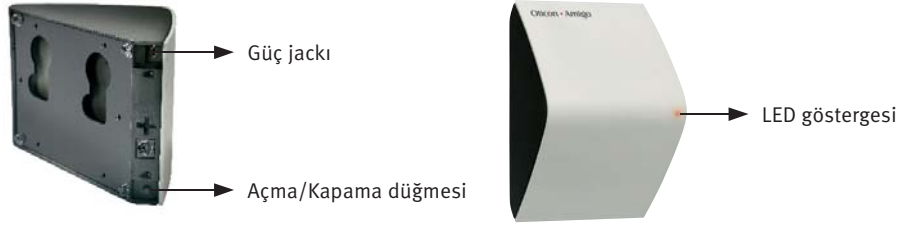

## Amigo eZync'e güç sağlamak

Amigo eZync'e güç sağlamak için, güç kaynağını takın (resme bakınız) ve duvardaki çıkış yeri ile bağlantısını kurunuz.

Amigo eZync'te 48 saate kadar yetecek pil yedeği bulunmaktadır. Ana güçle bağlantısı kesildiğinde (yada tam tersi) otomatik olarak pil gücünü kullanmaya başlayacaktır.

Amigo eZync ilk kez kullanıldığında pil yedeklemesi için şarj birkaç saat sürebilir. Amigo eZync her fişe takıldığında yedekleme sürekli devam edecektir.

### NOT


Pil değişimi kullanıcı tarafından yapılamamaktadır. Amigo eZync zarar vermeden açılmaz.



## Amigo eZync nereye yerleştirilmelidir?

Amigo eZync'in senkronizasyon alanı yaklaşık 1.5 metredir. Senkronizasyon komutunun kulak seviyesi FM sistemlerine sürekli ulaşmasını sağlamak için yerleştirileceği yer çok önemlidir.

Kapıya yakın yerler veya sınıfın dışındaki koridor yerleştirilebilecek en uygun yerlerdir. Böylece tüm alıcıların doğru kanala senkronize olduğundan her zaman emin olabilirsiniz.

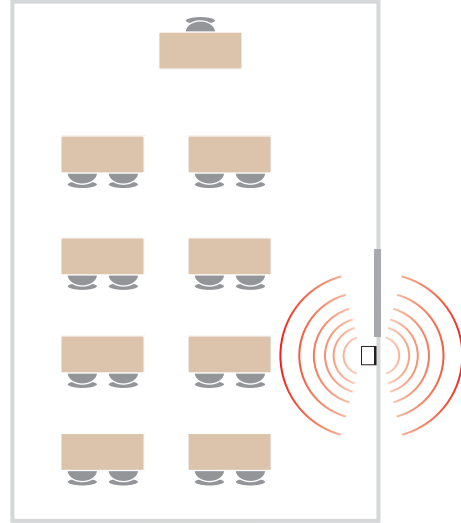

### NOT

Duvardaki çıkış Amigo eZync'e çok uzaksa uzatma kablosu kullanılabilir.

### NOT

Amigo eZync kapsama alanı içinde kalan tüm yönlerdeki (360°) Amigo kulak seviyesi FM sistemlerinin senkronizasyonu otomatik olarak yapar. Senkronizasyon duvarlara rağmen yapılabilir.

## Amigo eZync'i duvara asmak


Bu ünitenin yerleştirilmesi gereken optimum pozisyon girişin yanında ve yerden 1.5 metre yüksekliktedir.(bakınız sayfa 11).

1. Duvar askısını kullanarak deliklerin yerini belirleyin.
2. Duvara iki adet delik açın.
3. Gerekliyse açılan deliklere dübel takın.
4. Duvar askısını vidalamak suretiyle sabitleyin.
5. Duvar askısını üniteyi güvenli bir şekilde taşıyacağı hale getirinceye kadar vidaları sıkıştırarak sağlamlaştırın.

Amigo eZync sadece küçük çocukların kullandığı bir yere yerleştirilecekse 1.5 metreden daha aşağıya takılabilir.


### NOT

Duvar askısı kullanıldığında vidaların gereğinden fazla sıkılması askının şeklini bozabilir.

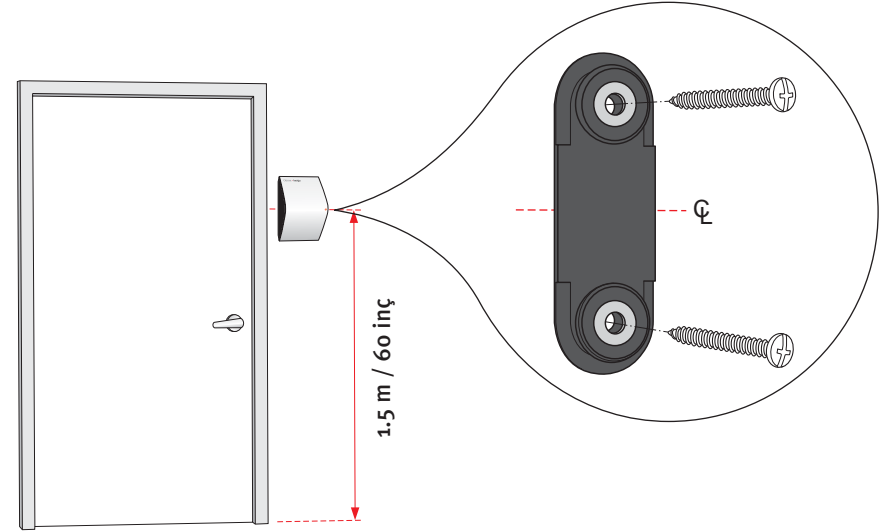

Duvar askısı takıldığında güç kaynağını Amigo eZync'in üzerindeki yere takın. Sonra Amigo eZync'i askının üzerine yerleştirin:

1. Amigo eZync ile askıyı aynı hizaya getirin.
2. Amigo eZync'i duvar askısına yerleştirdikten sonra ürünü yerine kilitlemek için sola doğru itin.
3. Amigo eZync'i yerinden çıkartmak için hafifçe kaldırın ve sağa doğru itin.

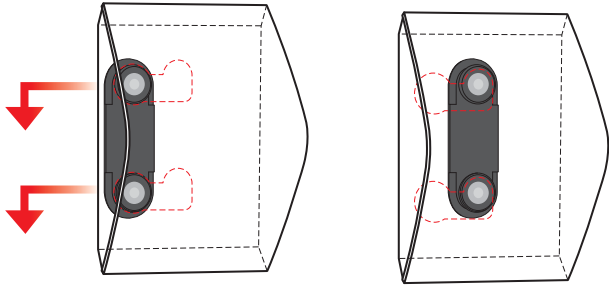

## Amigo eZync'i rafa yerleştirmek

Amigo eZync'in yerini sık sık değiştirmek zorunda kalıyorsanız, Amigo eZync ile birlikte gönderilen raf desteğini kullanın. Güç kablosunu takın ve Amigo eZync'i rafa yerleştirin.



### NOT

Portatif destek kullanılacağı zaman, Amigo eZync'in yere düşmesini engelleyecek konumlar tercih ettiğinizden emin olun.

## LED hakkında

Amigo eZync'in üzerindeki LED ürünün çalıştığı bilgisi dışında da bilgiler verir:



Sürekli Kırmızı  
Açık ve sinyal iletiyor



Yanıp sönen kırmızı  
Pil yedeği ile çalışıyor



Üç kere yanıp sönmeye  
Senkronizasyon komutu  
kabul edildi



Kapalı yada Hata Var

## Kanal seçimi ve değişimi

Amigo eZync üzerindeki kanal Amigo T20/T21/WRP ile senkronize edilerek değiştirilebilir.

Amigo T20/T21/WRP vericilerindeki kanalı değiştirmek için ▲ düğmesi yada ▼ düğmesine iki saniye süre ile basın ve önceden belirlenmiş kanal listesinden bir kanal seçin.

Kanal numarası yanıp sönmeye başladığında ▲ yada ▼ düğmesine basarak kanalı değiştirin. İsteddiğiniz kanalı bulduktan sonra onaylamak için SYNC düğmesine basın. Böylece verici bu yeni kanala ayarlanacak ve kilitlenecektir.

Kanal numarası yanıp sönerken C-düğmesine basarak orijinal kanala geri dönebilirsiniz. Bu sizi aynı zamanda verici ekranında döndürecektir.

Kanal değişimi yapmak istediğiniz her zaman bu prosedürü tekrarlayın.

## Amigo eZync'i senkronize etmek

Amigo eZync açıldıktan sonraki ilk 60 saniye içinde senkronize edilebilir.

Yaklaşık 50 cm mesafeden, Amigo T20/T21/WRP'nin üzerindeki SYNC düğmesine basın. Senkronizasyon başarılı şekilde yapılmışsa Amigo eZync üzerindeki LED üç kere yanıp sönecektir.



### NOT

Amigo eZync açıldıktan sonra 60 saniyeden fazla zaman geçmişse alıcıları senkronize etmeyecektir.

## Diğer üreticilere ait alıcılara senkronize etmek

Amigo eZync ile Amigo kulak seviyesi ve Widex kulak seviyesi alıcılarını senkronize edebilirsiniz.

[www.oticon.com](http://www.oticon.com) sitesini ziyaret ederek uyumluluk kılavuzunu kontrol edebilirsiniz.

## Amigo eZync'i temizlemek

Amigo eZync neme karşı dayanıklıdır. Bu nedenle hafif nemli bir bez kullanılarak silinebilir.

## Ek A: Sorun Giderme

Problem	Çözüm
LED çalışmıyor	Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Amigo eZync açık olup olmadığını kontrol edin.
LED yanıp sönüyor	Amigo eZync pil yedeği ile çalışıyor. Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
Amigo eZync senkronize edilemiyor	Senkronizasyon Amigo T20/T21/WRP kullanılarak kablosuz olarak yapılır. Amigo eZync onay vermiyorsa (LED üç kere yanıp sönüyorsa), vericiyi daha yakına yada diğer tarafa doğru tutun. Ve tekrar SYNC düğmesine basın. Amigo eZync'i açıldıktan sonraki 60 saniye içinde senkronize etmek mümkündür. Kanal değişimi yapmak için Amigo eZync'i kapatın, tekrar açın ve bir kez daha senkronize edin.

Başka sorularınız için lütfen işitme cihazı uzmanınıza danışınız. Yada [www.oticon.com](http://www.oticon.com) adresindeki Amigo sorun giderme kılavuzunu kullanın.

## Ek B: Üretici Garantisi

Üretici, Oticon bu ürünün orijinal müşterisine bir yıllık limitli garanti sağlar.

Bu garanti ürünün orijinal satın alınma tarihinde başlar ve bir takvim yılı süresince geçerlidir.

Bazı ülkelerde garanti süreleri uzatılmış olabilir. Lütfen sizin ülkenizdeki durumu kontrol edin ve daha ayrıntılı bilgi almak için işitme cihazı uzmanınızla irtibat kurun.

### **Bu garanti hangi durumları kapsar?**

Bu garanti süresince düzgün ve normal kullanıma rağmen işçilik, üretim veya dizayn hatalarından kaynaklı fonksiyonunu düzgün bir şekilde yerine getirmeyen herhangi bir elektronik parça ücretsiz olarak tamir edilir yada değiştirilir. Ürünün satın alınan yere ulaştırılması sırasındaki masraflar kullanıcıya aittir. Ürünün tamir edilmesi mümkün değilse ürün müşteri ve işitme cihazı uzmanının birlikte varacakları mutabakatla benzer bir ürünle değiştirilir.

### **Bu garanti hangi durumları kapsamaz?**

Bu bir yıllık limitli garanti aşağıdaki halleri kapsamaz:

- Kötü ve hatalı kullanım, ihmal veya kaza sonucu oluşan arızalar.
- Satın alma tarihinden 90 gün sonra bozulan ikincil aksesuarlar.
- Talimatların dışında bağlanan, yüklenen veya ayarlanan cihazlar
- Önemsiz zarar ve bu ürünün gecikmesi veya kaybolması sonucunda oluşan zararlar. Bu garanti belirtildiği gibi tamir veya değişimle kesinlikle sınırlıdır.
- Transit sırasında nakliyeciler tarafından durumun raporlanması ve üreticiye bildirilmesi halleri dışında zarar gören ürünler.

Üretici daha önceden haber vermeksizin ve daha önceden satılan ürünlerde bu değişimi uygulama yaptırımı olmaksızın, cihazların yapı yada dizaynında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu garanti daha önce üretici tarafından dile getirilen tüm garantilerin üzerindedir. Ürünün satışı yada kullanımı ile ilişkili hiç bir temsilci veya kişi üretici adına yazılanların dışında bir sorumluluğa giremez.

Amigo sisteminizi arızalandığında garanti dahilinde servis alabilmek için nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde dikkatlice paketleyin ve satın aldığınız firmaya gönderin. Problemi detaylı bir şekilde tarif edin, isminizi, telefon numaranızı, adresinizi yazın.

Yukarıda yazılı olan garanti ülkenizde sanayi bakanlığı ve tüketici haklarınca tanımlanan haklarınızı etkilemez. Satın aldığınız yer size bu limitli garanti ötesinde haklar tanımış olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen satın aldığınız firmaya başvurun.

Amigo eZync 3.714 MHz kullanarak çalışır. Bu vericinin manyetik alan etkisi -15 dBµA/m @ 10 m'den azdır.


eZync'in emisyon gücü uluslararası İnsan sağlığı için gerekli olan emisyon limitlerinin altındadır. Kıyaslamak gerekirse Amigo eZync'in yaydığı radyasyon örneğin saç kurutma makinaları, elektrikli traş makinalarının yaydığı elektromanyetik radyasyondan daha azdır.

Amigo eZync Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili uluslararası standartlara uyumludur.

Oticon böylece Amigo ürününün Directive 1999/5/EC'nin gereği şartlarına ve ilgili maddelerine uyduğunu bildirir. Uyum Deklarasyonu aşağıda bulunan adresten istenebilir:

Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark.

Amigo eZync radyo vericisi içerir:

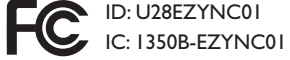

Alet FCC kurallarının Bölüm 15 ve Kanada Endüstrisinin RSS-210 ile uyumludur.

Çalışması alttaki iki duruma bağlıdır:

1. Bu alet parazit oluşturmamalıdır.
2. Bu alet istenilmeyen çalışmaları kapsayan parazitleri kabul etmelidir.

Alet üzerinde Oticon tarafından onay alınmadan yapılan değişiklik ve modifikasyonlar FCC'nin bu ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

## Uyarılar

Amigo eZync oyuncak değildir. Bu nedenle çocukların ve parçaları yutabilecek ve kendisine zarar verebilecek kimselerin ulaşamayacağı yerlere konulmalıdır. Çocukların yutmasını engellemek için küçük parçalara daha fazla dikkat edilmelidir.

***Parça yutulması halinde acilen doktora başvurun.***

USB bağlantılı şarj edilebilir pillerin güvenliği sadece harici ekipmanlara bağlıdır. USB bağlantısı güç kaynağı ile çalışıyorsa, bu ekipman UL onaylı yada benzer güvenlik gereksinimleri ile uyumlu olmalıdır.

Amigo eZync'i asla mikro dalga fırına koymak yada yakmak sureti ile fazla ısıya maruz bırakmayın. Patlayarak ciddi hasarlara yol açma riski bulunmaktadır.

Amigo eZync Uluslararası Elektromanyetik Uyumluluk standartlarının uyulması gereken kuralları ile uyumludur. Bununla birlikte ünite kalp atışlarını düzenleyen aygıtlar ve defibrillatörler gibi diğer medikal aletlerde parazite neden olabilir. Lütfen implantınızın üreticisi ile irtibata geçerek rahatsızlık riski hakkında bilgi alın. Parazit aynı zamanda güç hattı, havaalanı metal dedektörleri, diğer medikal aletlerin elektromanyetik alanları, radyo sinyalleri ve elektrostatik tahliyesinde de oluşabilir.

908 67 210 00 / 11.08

Satın Alma Tarihi :

Amigo seri numaraları:

Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark  
www.oticon.com



Elektronik aletlere ait atıklar yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.



NI 175

