

Amigo Vericileri için Mikrofon Kullanım Kılavuzu


- T20/T21 omni direksiyonel lapel mikrofon
- T20/T21 direksiyonel lapel mikrofon
- T20/T21 omni direksiyonel lavaliare (boyun askılı) mikrofon
- T10 omni direksiyonel lapel mikrofon

Amigo T20/T21 vericiler için Omni direksiyonel lapel mikrofon 890-52-100-00

Omni direksiyonel lapel mikrofon elbise üzerine takılan küçük ve hafif bir mikrofondur. Üzerinde bir elbise askısı vardır ve mikrofon kablosu içine yerleştirilmiş anteni vardır. T20/T21 üzerindeki mikrofon girişine, mikrofon jackını takınız.

Amigo T20/T21 vericileri için Direksiyonel lapel mikrofon 890-52-120-00

Direksiyonel lapel mikrofon vücut üzerine takılan küçük, hafif ve gürültü önleyici mikrofondur. Elbise askısı ve kablosu içine yerleştirilmiş bir anteni vardır. Bu mikrofonun jackı, T20/T21 üzerindeki mikrofon girişine takılır.

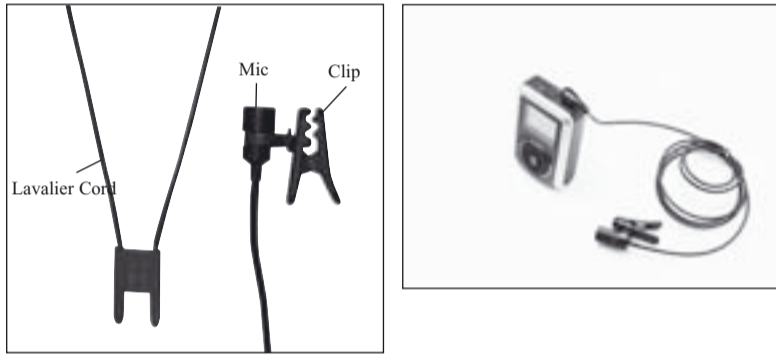

1

Kullanım Şekilleri



Not: Gürültü riskini azaltmak için, kolyenize bu mikrofonu takmayın veya takılarınıza temas edecek yerlere takmayınız.

2

Amigo T20/T21 vericileri için Lavaliere mikrofon 890-52-110-00

Lavaliere mikrofon boyna asılan ve vücut üzerinde taşınan küçük ve hafif bir omni direksiyonel mikrofondur. Lavaliere mikrofonun boyun çevresine kadar giden ayarlanabilir ve içinde anten olan bir kordonu ve konfor sağlamak için boyun kordonunda küçük bir yuvası vardır.



Adım 1: Bir yanından bastırarak kabloyu takın ve kabloyu diğer tarafa sokun.



Adım 2: Eğer isterseniz mandalı takın



Adım 3: Lavaliere mikrofonunu T20/T21'in üzerinde askının sonuna kadar kaydırın.



Adım 4: Lavaliere mikrofonunu T20/T21 in üzerine klik sesi gelene kadar oturtun



Adım 5: T20/T21 üzerindeki girişe mikrofon jackını takın.

3


4

Amigo T10 verici için Omni direksiyonel lapel mikrofon 890-52-140-00

Omni direksiyonel lapel mikrofon vucüt üzerine takılan küçük hafif bir mikrofondur. Lapel mikrofon LCD ekranın (T10 ünitesinin arka tarafındaki) SAĞ tarafındaki küçük düğmeye bir kalem ucu veya ataç ucu ile bastırıldığında çalışacaktır, bu nedenle "HI" yazısı kanal numarası ile değişerek görünecektir.

Lapel mikrofonun takılması



1. Ön taraftan omni modu açın 
2. Lapel mikrofonu takın
3. .HI/LO butonuna bir kalem ucu ile HI seviyesini ayarlamak için basın.



Yüksek hassasiyette (mic) ekranda değişimli olarak HI ve kanal numarası görünür



Mikrofon kullanmak için Omni modu kullanın

5

Not:Kaydırmalı Mod anahtarını Focus veya Super Focus konumuna değiştirdiğinizde, lapel mikrofon devreden çıkacaktır ve T10 'un içindeki direksiyonel mikrofon aktif hale geçecektir.

Lapel mikrofonu uzun bir süre ihtiyaç duyulmadığında/ takılmadığında ve mic fişi verici üniteden çıkarıldığında bir kalem ucu veya ataç ucu kullanarak LCD ekranın sağ tarafındaki butonu bastırıp HI den LO dönmek için, prosedürü tekrar etmelisiniz. Bu adım tamamlandığında, sadece kanal numarasını göreceksiniz ve LO yazısı ekranda görünecektir.

6

Amigo T10 ve T20/T21 vericiler için Boom mikrofon

T10 Boom mikrofon, 3.5 mm jack:

890-52-150-00

T20/T21 Boom mikrofon, 2.5 mm jack:

890-52-130-00

Amigo T10, T20 ve T21 vericileri için olan boom mikrofonlar sesi alacak ve konuşmacının bulunduğu her duruma uyacak şekilde hareket özgürlüğü sağlar.

T20 ve T21'de mikrofon kordonunun içinde anten bulunmaktadır. Ancak T10'da harici anten bağlanması gerekmektedir.

Sol kulağa takılacak şekilde dizayn edilmiştir. Gözlük takanlar da çok rahat kullanabilirler. Rüzgar filtresi rüzgar sesini azaltmaya yardımcı olur.



1. Adım: Askıyı sol kulağın üzerine yerleştirin. Bağlantının kulak memesini arkadan desteklemesine izin verin. Bu mikrofonun ağza uygun uzaklıkta olması için gereklidir.

2. Adım: Mikrofon kablosunun sonundaki jackı T10 veya T20/T21'üzindeki giriş jackına takın.

Boom mikrofonlar tüm vericilere lapel mikrofonlarda olduğu gibi takılır. Nemli bir bez kullanmak sureti ile temizlenebilir.

7

Amigo T10 ve T20/T21 vericiler için Boom mikrofon

T10 Boom mikrofon, 3.5 mm jack:

890-52-150-00

T20/T21 Boom mikrofon, 2.5 mm jack:

890-52-130-00

Amigo T10, T20 ve T21 vericileri için olan boom mikrofonlar sesi alacak ve konuşmacının bulunduğu her duruma uyacak şekilde hareket özgürlüğü sağlar.

T20 ve T21'de mikrofon kordonunun içinde anten bulunmaktadır. Ancak T10'da harici anten bağlanması gerekmektedir.

Sol kulağa takılacak şekilde dizayn edilmiştir. Gözlük takanlar da çok rahat kullanabilirler. Rüzgar filtresi rüzgar sesini azaltmaya yardımcı olur.



1. Adım: Askıyı sol kulağın üzerine yerleştirin. Bağlantının kulak memesini arkadan desteklemesine izin verin. Bu mikrofonun ağza uygun uzaklıkta olması için gereklidir.

2. Adım: Mikrofon kablosunun sonundaki jackı T10 veya T20/T21'üzindeki giriş jackına takın.

Boom mikrofonlar tüm vericilere lapel mikrofonlarda olduğu gibi takılır. Nemli bir bez kullanmak sureti ile temizlenebilir.

Oticon A/S
9, Kongebakken
DK-2765 Smørum

CE 0543



Elektronik gereçlerden kaynaklanan atıklar yasal düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.



www.oticon.com

8