

Oticon ♦ Vigo Pro

Oticon ♦ Vigo

KULLANIM KILAVUZU



CIC, MIC, ITC, ITE

oticon
PEOPLE FIRST

Teşekkürler

Daha iyi duymak için bizim ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazlarınızı daha rahat kullanabilmeniz ve çabalarınızı desteklemek için en yüksek kalite kullanılmıştır.

Cihazın bütün faydalarını anlamanız ve sağlanan yüksek performansın devam etmesi için bu kitapçığı dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bugünkü işitme cihazı teknolojisinin en gelişmiş ürününü seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.


Önemli Uyarı

Cihazınızı kullanmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. Kitapçık güvenlik uyarıları, farklı durumlara göre öneriler, piller, cihazın kullanımı ve olası problemlerde yapılabilecek işlemlerde dahil olmak üzere bir çok önemli bilgi içermektedir.

İçindekiler


Cihazın görüntüsü CIC/MIC	5
Cihazın görüntüsü ITC	7
Cihazın görüntüsü ITE	9
Pil deęiřimi	10
İřitme cihazlarını Açma/Kapama	12
İřitme Cihazlarını Takmak	13
Programlar (Opsiyonel)	14
Bekleme (sadece dokunmatik düęmeyle yüklenir)	16
Ses ayarı (Sadece ITE için opsiyonel)	17
Telecoil (Opsiyonel)	19
Oto Telefon (Opsiyonel)	20
Uyarılar	Sarı sayfalar
İřitme cihazlarının bakımı	22
Daha iyi duymak için yedi adım	27
Sık yařanan sorunlar ve çözümleri	32

Cihazın Görüntüsü CIC/MIC

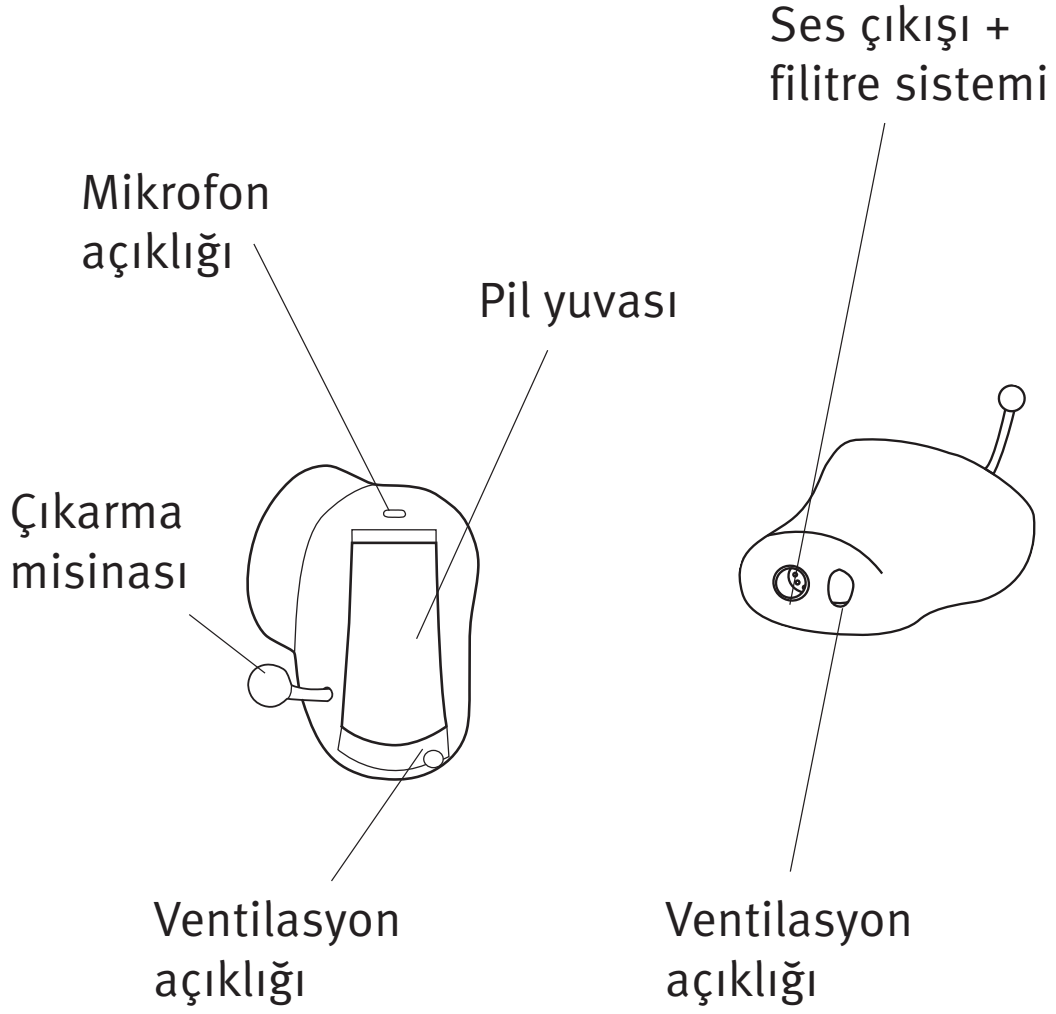


Pil numarası: 10

Cihazın Görüntüsü ITC

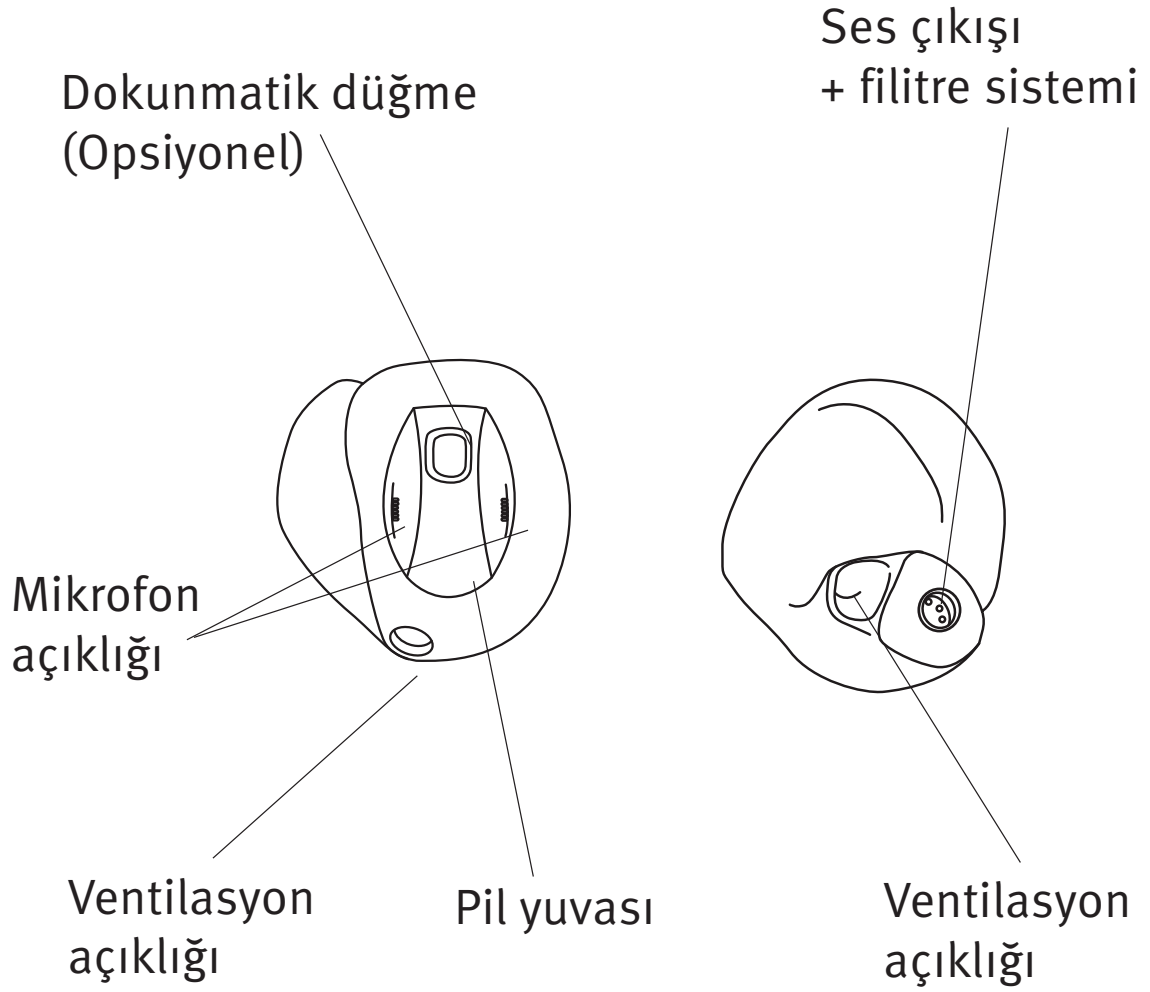

Pil numarası: 312

Cihazın Görüntüsü ITE

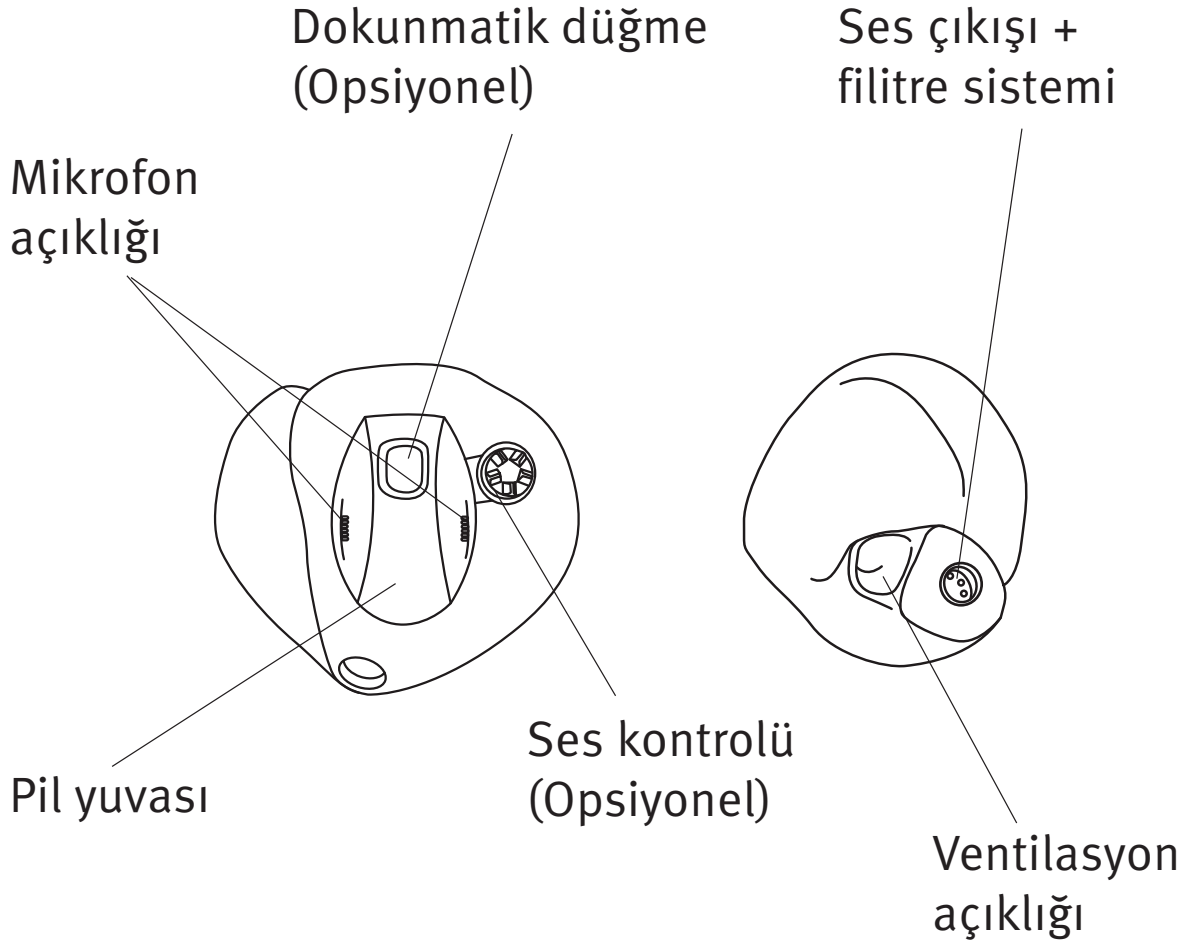

Pil numarası: 312

Pil Deęiřimi


Kullanmanız gereken pil numarası kitapçığın ilk bölümünde yazılıdır.

Biten pil hemen deęiřtirilmeli ve yerel kurallara göre atılmalıdır.

Piliniz azaldığında bir dizi kesik bip sesi duyarsınız. Bu pili deęiřtirmeniz gerektiğini gösterir.


Pili deęiřtirmek için ařağıdaki yolu izleyiniz:

- Tırnaęınızla pil yuvasını açın ve eski pili çıkartın. Biten pil çok amaçlı aracın arka kısmı kullanılarak çıkartılabilir.

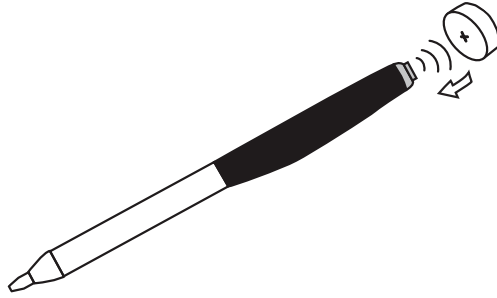

Pili tutabilmek için aletin arkasındaki mıknatıs kullanılabilir.

- Yeni pilin + işaretinin olduđu taraftaki yapışkan bandı pilden ayırın.
- Pil üzerindeki + işareti ile pil yuvasındaki + işareti aynı yöne gelecek şekilde yerleştirin.
- Pil yuvasını kapatınız. Dirençle karşılaşırsanız pili ters takmış olabilirsiniz. Pili tekrar takınız ve tekrar deneyiniz.

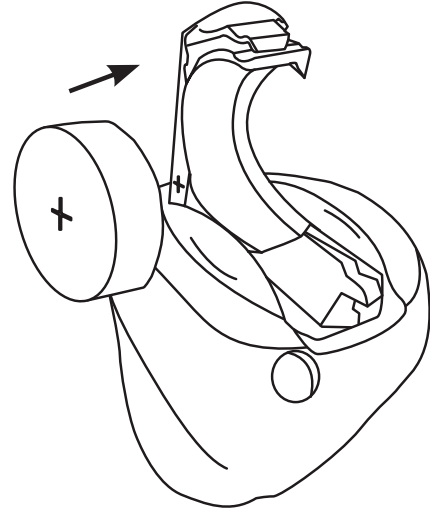

Pilin tam kapasiteyle çalışması birkaç saniyenizi alabilir.

Önemli Uyarı


Kullanmadığınız zamanlarda, özellikle geceleri, cihazın hava almasını sağlamak amacı ile pil yuvasını açık bırakınız.

İşitme Cihazlarını Açma/Kapama

AÇIK:

Pil yuvasına pili yerleştirip kapatınız. Pil yuvasını kapattığınızda kısa bir seri bip sesini takip eden üç adet bip sesi duyacaksınız. Bu pilinizin çalıştığını gösterir (Not: CIC ve MIC modelleri için, ilk üç bip sesini duyacaksınız).


AÇIK

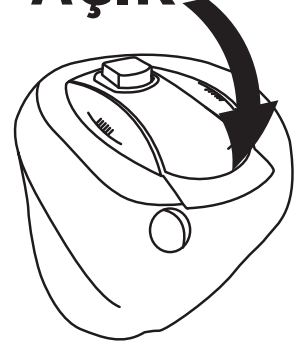

KAPALI:


Tırnağınızı kullanarak pil yuvasını açınız. Kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazını kapatarak pilin tükenmesini önleyiniz.

KAPALI

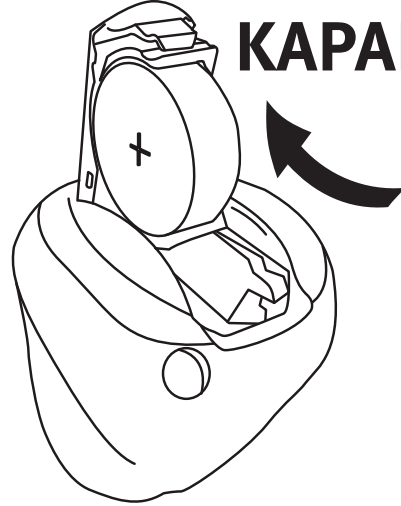


İşitme cihazlarını takmak

İşitme cihazını kulak kanalına yerleştiriniz (sağ işitme cihazını yerleştirmek için sağ elinizi, sol işitme cihazını yerleştirmek için sol elinizi kullanınız).

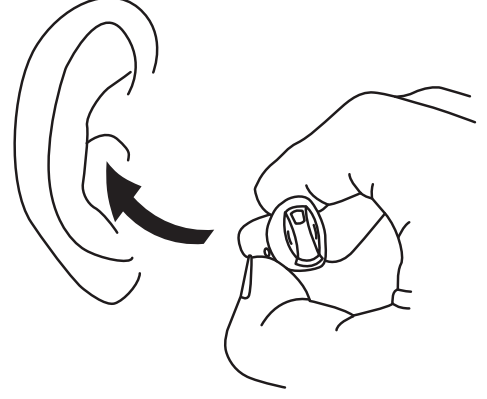

Kulak memesini aşağı çekin ve gerekirse sağa sola çevirerek kulak kontörünü takip ederek işitme cihazını kulak kanalına itiniz.

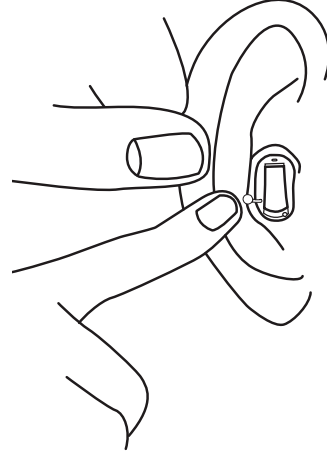


Pil yuvasını cihazı tutmak veya kulaktan çıkartmak için kullanmayınız. Pil yuvası bu amaç için yapılmamıştır.





Programlar (Opsiyonel)

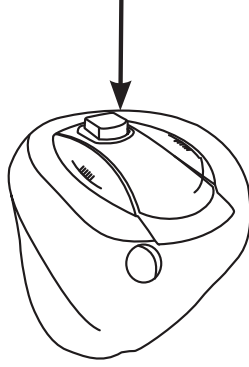İşitme cihazınızda programlar arası geçiş yapmaya yarayan bir dokunmatik düğme bulunabilir.

Programı aktiveştirmek için dokunmatik düğmeye kısa süreli basınız.



İşitme cihazınıza dört farklı program yüklenebilir. Program seçimi yaptığınızda işitme cihazınızdan bip sesi duyulur. Bip sayısı kaçınıcı programda olduğunuzu belirtmektedir.

	Bir bip, 1. Programa geçtiniz
	İki bip, 2. Programa geçtiniz
	Üç bip, 3. Programa geçtiniz
	Dört bip, 4. Programa geçtiniz

İşitme cihazınızda bulunan programların açıklamasını aşağıda görebilirsiniz.

Program 1: _____

Program 2: _____

Program 3: _____

Program 4: _____


Bekleme (Sadece dokunmatik düğmeli cihazlarda yüklüdür)

Cihazınızda dokunmatik düğme varsa dokunmatik düğmeye uzun süreli (min. 3 saniye) basmak cihazı bekleme moduna alır.

Cihazı tekrar aktif hale getirmek için düğmeye tekrar basın.

Bekleme fonksiyonunu sessizlik istediğiniz durumlarda kullanın.

3 saniye
basınız

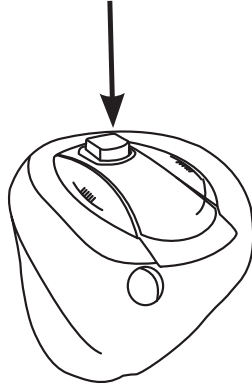


Uyarı

Bekleme özelliği sırasında pil tüketimi devam ettiği için işitme cihazını kapatmak için kullanılmamalıdır.

Ses Kontrolü (Opsiyonel)



Cihazınızda sesi ayarlamak için bir düğme bulunabilir. Bu düğme parmağın uç kısmı kullanılarak her iki yöne çevrilebilir.

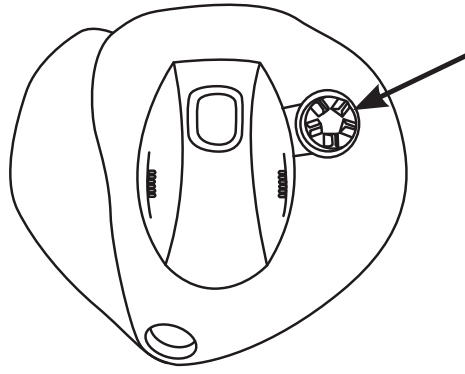

**Ses Kontrol
Tekerleği**

Ses kontrolü belli dinleme koşullarında kendinizi rahat hissedeceğiniz ses seviyesine ayarlamayı sağlar.

Sesi açmak için kontrolü yukarı çeviriniz.
Sesi kısmak için kontrolü aşağı çeviriniz.

Cihaz açıldığında tercih edilen ses ayarı ile açılacaktır. Ses istenilen seviyeye geldiğinde bip sesi duyacaksınız.

Telecoil (Opsiyonel)



Telecoil, telefon görüşmelerinde, tiyatrolarda ve salonlarda kullanılan loop sistemleri için kullanılan ayardır. Telefonda tele-loop olmalıdır.

Telecoil dokunmatik düğmeye basılarak aktif hale getirilir. Aktif hale getirdiğinizde belli sayıda bip sesi duyacaksınız.


Telecoilin hangi programda olduğunu görmek için bir önceki sayfaya bakınız.

OtoTelefon (Opsiyonel)

Cihazınızda Otomatik telefon özelliđi olabilir. Oto Telefon sadece iřitme cihazı telefon alıcısına yaklařtırıldıđında aktif hale gelir. Telefon programı aktif olduđunda belli sayıda bip sesi duyacaksınız.

Telefon gürüşmeniz bittiđinde, iřitme cihazınız otomatik olarak önceki programına dönecektir.

NOT: Bütün telefonlar Oto Telefonu aktif hale getiremez. Telefon alıcısında özel bir magnet bulunmalıdır. Özel magnet ile ilgili bilgi almak için lütfen iřitme cihazı uzmanınıza danıřınız.

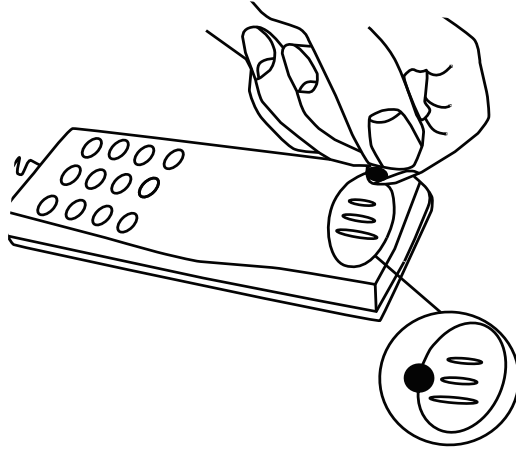

Uyarı

Ototelefon mıknatısı kullanılıyorsanız:

- Mıknatısı çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Mıknatısın yutulması halinde acilen doktora başvurunuz.
- Mıknatısı kredi kartı ve diğer manyetik olarak hassas olan aletlerden 30 cm uzakta tutunuz. Tercihen mıknatıslı telefonu, implant aletler ve kalp atışlarını düzenleyen aletlerin diğer tarafında kullanınız.

İřitme cihazlarının bakımı

Kulaklarınız iřitme cihazının ses ıkıřını veya ventilasyonunu tıkayabilecek kulak kiri üretir. Bu nedenle iřitme cihazınızda özel filitreler bulunur. İřitme cihazınızdaki filitre sistemi ile ilgili bilgi almak için İřitme Cihazı Uzmanınıza bařvurunuz.


İřitme cihazınızın bakımını zemini yumuřak bir yerde yapınız.

Böylece olası düřürmelerde cihazın zarar almasını önlemiř olursunuz.

Cihazların temizlenmesi



Cihazların temizlenmesi için içinde fırçasıda bulunan çok amaçlı özel alet hazırlanmıştır. Bu aletler cihazlarınızın en iyi şekilde bakımını yapmanıza ve performansının devamına yardımcı olacaktır.

Çok amaçlı alet

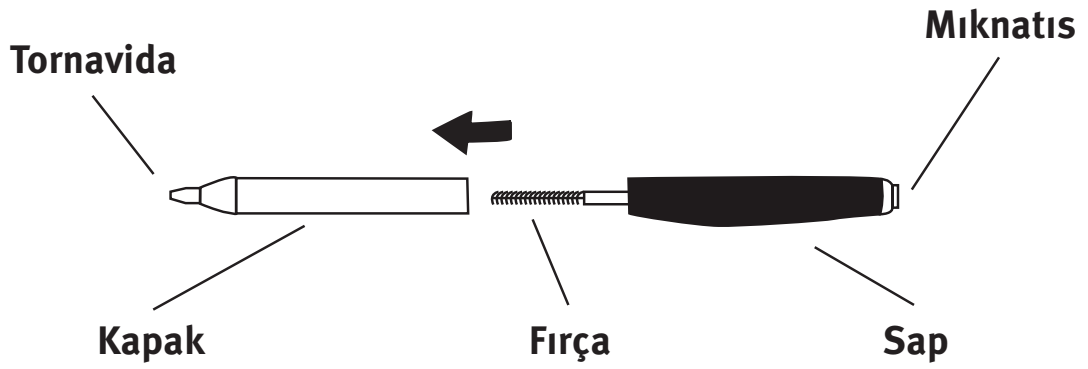

Cihazın temizlenmesi

- Pil yuvasını açın.
- Ses çıkışı yada ventilasyon etrafında bulunan tüm kulak kiri birikintisi fırça yardımıyla temizlenir.
- Mikrofon açıklığı kir yada toz ile tıkanırsa bu cihazın performansını etkiler. Fırça ile bu gözle görülür kısımdaki birikinti temizlenmelidir.
- Ventilasyon açıklığı fırçayı aşağı yukarı hareket ettirmek sureti ile temizlenir.
- Cihazın yüzeyini temizlemek için mendil kullanınız.



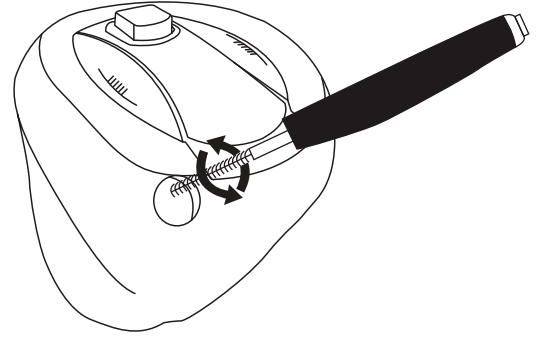
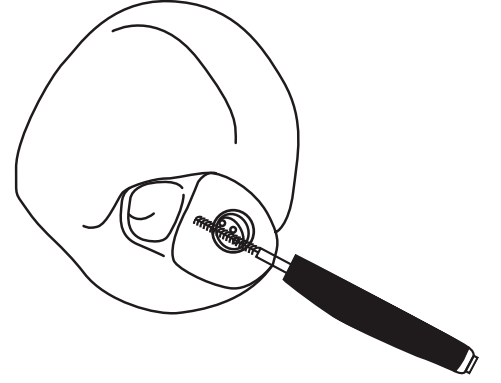


Cihazın kendisi asla su veya bir başka sıvı ile yıkanmamalıdır yada temas ettirilmemelidir!

Gerektiğinde fırçayı değiştiriniz. Sapından tutarak ayırınız. Yeni fırçayı takınız ve yerine oturduğundan emin olunuz.

NoWax'ın deęiřtirilmesi

1. Aleti kabuęundan ayırın. Aletin iki kolu vardır. Bir tanesi yeni filitre dięeri ise ıkarma aparatıdır.
2. Kullanılmıř filitreyi yerinden ıkartmak iin ıkartma ucunu filitrenin iine yerleřtirin.
3. Yeni filitreyi cihaz takın.
4. Kullanılmıř aleti atın.

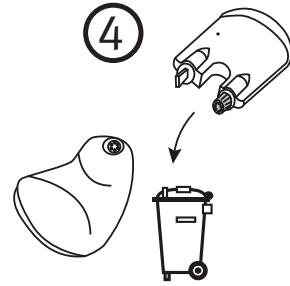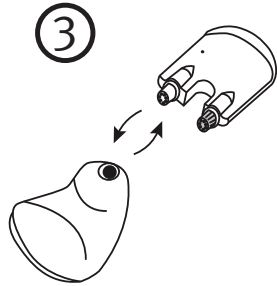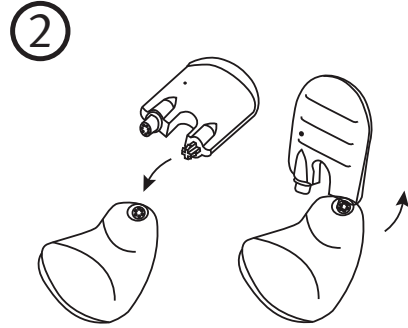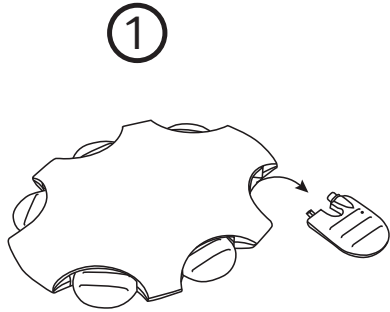

Isı, nem ve kimyasallardan koruma

Cihazlarınız örneğin sıcak havalarda park edilmiş araç içinde bırakılmamalıdır. Banyo yaparken, yüzerken veya yağmurlu havalarda kullanılmamalıdır. Mikrodalga veya normal fırınlarda kurutulmamalıdır.

Pil üzerinde nem oluşmuşsa bu performansını etkileyebileceği için mutlaka silinmelidir. Cihazınızı bu olumsuz etkenlerden korumak için nem alıcı tablet veya aletler kullanarak cihazınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Uzmanınızın konu ile ilgili tavsiyesini mutlaka sorunuz.

Saç spreyi, parfüm, sinek savar, traş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler cihazınıza zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce işitme cihazınızı mutlaka çıkartınız ve ürün kurumadan önce tekrar takmayınız. Eğer losyon kullanıyorsanız işitme cihazınızı takmadan önce ellerinizi mutlaka kurulayınız.

Daha iyi duymak için yedi adım

Yeni işitme cihazınıza alışmanız zaman alacaktır. Bu sürenin ne kadar süreceği daha önce işitme cihazı kullanıp kullanmadığınıza ve işitme kaybınızın derecesi gibi faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye değişir.

1. Sessiz ev ortamı

Kendinizi tüm yeni seslere alıştırmaya çalışın. Arka plan gürültülerini dinleyerek sesin kaynağını ayırt etmeye çalışın. Daha önceden alışık olduğunuz bazı seslerin artık farklı gibi geleceğini aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bu sesleri tekrar ayırt etmeyi öğrenmeniz gerekebilir. Çevredeki hafif tonlu seslere zamanla alışacaksınız – aksi durumda lütfen uzmanınıza başvurunuz.

Cihazlarınızı kullanırken yorulduğunuzu hissederseniz çıkarıp bir süre dinlenin. Aşamalı olarak daha uzun süreli dinlemeye başlayacaksınız. Ve kısa süre sonra tüm gün rahatlıkla dinlemeye alışacaksınız.

2. Bir başkası ile sohbet

Başka bir insanla sessiz bir odada oturunuz. Karşınızdakinin yüz ifadesini kolay görebilecek şekilde pozisyon alın. Yeni konuşma sesleri sizi ilk başlarda biraz rahatsız edebilir. Ancak beyin bu yeni seslere adapte olduktan sonra konuşmaların daha berrak ve anlaşılabilir olduklarını göreceksiniz.

3. Radyo ve TV dinlemek

Televizyon ve radyo dinlemeye daha anlaşılır konuşukları için haber spikerlerini dinleyerek başlayın. Eğer hala televizyon veya radyo dinlemekte zorlanıyorsanız uzmanımızdan size yardımcı dinleme ürünleri hakkında bilgi vermesini isteyiniz. İşitme cihazınızın programları arasında telecoil varsa, loop sistemi ile kombinasyonundan faydalanabilirsiniz.

4. Grup sohbetleri


Grup sohbetleri beraberinde daha çok arka plan gürültüsü getirdiğinden başa çıkılması zor bir durumdur. Bu gibi durumlarda dinlemek istediğiniz kişiye odaklanın. Herhangi bir kelimeyi kaçırmamız halinde tekrar etmesini isteyiniz.

5. Tiyatro ve sinemalarda telecoil kullanımı

Tiyatro ve sinemalarda yardımcı dinleme ünitesi kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bu sistemlerden gelen sinyal herhangi bir bağlantıya gerek kalmadan cihazınızın telecoili tarafından algılanır. Konu ile ilgili detaylar için uzmanımıza başvurunuz.

6. Telefon kullanımı

Telefon kullanırken sesin direkt işitme cihazının mikrofonuna ulaşması için alıcıyı çene kemiğinize yaslayın. Böylece işitme cihazının ötmesini engelleyerek rahatça konuşmayı anlayabileceksiniz. Alıcı bu pozisyonda iken, karşı taraftakinin rahatça sizi duyabilmesi için telefonun mikrofonuna doğru konuşmayı unutmayınız.

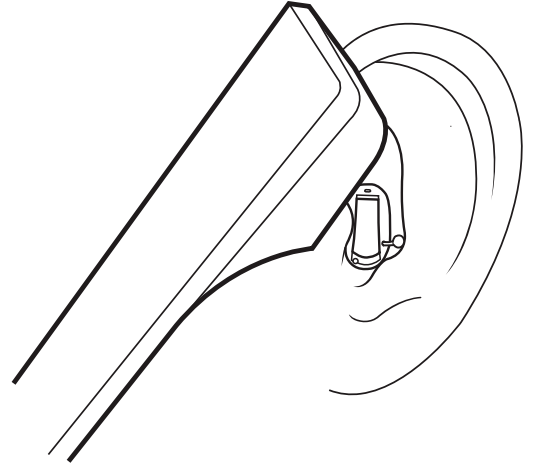

İşitme cihazınızda (ve telefonunuzda tele-loop varsa) telecoil varsa ses alımını kolaylaştırmak için bu programı kullanabilirsiniz. Telecoilin manyetik dalgaları aldığını unutmayınız. Faks, bilgisayar gibi birçok alet de manyetik dalgalar üretir. Bu tip makinelerin görüşmenizi engellememesi için telefondan en az 2-3 metre uzağında kaldığından emin olunuz.

7. Kablosuz ve mobil telefonlar

İşitme cihazınız genel geçerli uluslararası elektro-manyetik uyum standartlarının bir çoğu ile uyum içindedir. Ancak bütün mobil telefonlar işitme cihazları ile uyumlu değildir.

Ve rahatsızlık derecesi kullandığınız telefondan telefona değişebilir.

İşitme cihazlarının tüm gün boyunca kullanımı

Daha iyi duyduğunuzdan emin olmak için cihazları tüm gün kullanmalısınız. Bir çok vakada düzensiz işitme cihazı kullanımının kullanıcıya herhangi bir fayda sağlamadığı tespit edilmiştir.

İşitme cihazınız işitmenizi eski haline döndürmez, fiziksel nedenlerle oluşmuş işitme kaybını iyileştirmez veya daha kötü olmasından koruyamaz. Yaptıkları, mevcut işitme kabiliyetinizi daha iyi kullanmanızı sağlamaktır. Eğer iki işitme cihazınız varsa her zaman ikisini de takınız.

Çift taraflı işitme cihazı kullanmanın en önemli faydaları:

- Yön tayin etme kolaylaşır.
- Gürültüde konuşulanları anlama kolaylaşır.
- Daha net ve rahat ses duyulur.

Sık yaşanan sorunlar ve çözümleri

Etki	Neden
Ses yok	Piller bitmiş
	Ses çıkışı tıkanmış
Kesik kesik veya düşük ses	Ses çıkışı tıkanmış
	Nem
	Piller bitmiş
Düdük veya ötme sesi	İşitme cihazının doğru takılmamış
	Kulak kanalında kulak kiri birikmiş

Eğer sorununuz çözülmüyorsa lütfen uzmanınıza başvurunuz.

Çözüm	
Pili deęiřtiriniz	pg. 10
Ses ıkıřını temizleyin/ NoWax filtreyi deęiřtiriniz	pg. 24
Ses ıkıřını temizleyin/ NoWax filtreyi deęiřtiriniz	pg. 24
Pil yzeyini kuru bir bezle siliniz veya pili deęiřtiriniz	pg. 26
Pili Deęiřtiriniz	pg. 10
İřitme cihazını tekrar takınız	pg. 13
Kulak muayenesi iin doktorunuza gidiniz	

Uluslararası Garanti

Oticon işitme aletleri dağıtımından itibaren üreticisi tarafından 12 aylık limitli garanti kapsamına alınır. Bu limitli garanti sadece işitme aletinin kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar. Pil, filtre, hortum vb. aksesuarlar bu garanti kapsamının dışında kalmaktadır.

İşitme cihazının yanlış kullanımı ve bakımı, sürekli son ayarda ve kötü kullanımı, oksitlenme, yetkisiz servislerce açılması veya onarılması, kaza, kulaktaki fiziksel değişim, aletin içine yabancı madde girişine bağlı hasar ve uygun olmayan ayarda kullanımından kaynaklı problemler garanti kapsamı DIŞINDA olup garantiyi de tamamen geçersiz kılabilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması garanti şartları ve garantiyi geçersiz kılan şartların ayrıntılı tekrarı için lütfen kullanmadan önce uzmanımızdan tekrar bilgi alınız.

Service İhtiyaç Duyulduğunda

İşitme cihazınızı ufak teknik ve ayar problemlerini çözebilecek işitme cihazı uzmanınıza getiriniz.

Garanti Sertifikası

Kullanıcının Adı:

Bayinin Ünvanı:

Bayinin Adresi:

Bayinin Telefonu:

Satın Alma Tarihi:

Garanti Süresi:

Ay

Model Sol:

Seri no.:

Model Sağ:

Seri no.:

Pil Numarası:


Ürün onayı, tedbirler ve işaretler

İşitme cihazı 3.84 MHz'de çalışan kısa alanlı manyetik indüksiyonu ile çalışan radyo vericisi içermektedir. Vericinin manyetik alan kuvveti $\lt -42$ dB μ A/m @ 10m.

Radyo sisteminden kaynaklı emisyon gücü uluslararası İnsan Koruma limitlerinin altındadır. Kıyaslama gerekirse işitme cihazından kaynaklanan radyasyon örneğin halojen lambalar, bilgisayar monitörleri, bulaşık makinalarının verdiği elektromanyetik radyasyondan daha azdır. İşitme cihazları Elektromanyetik uyumu ile ilgili uluslararası standartlara uymaktadır.

İşitme cihazları üzerindeki limitli alan nedeni ile uygunluk işaretlerinin tamamı bu dökümanda bulunmaktadır.

İřitme cihazının kapsadıđı modül:

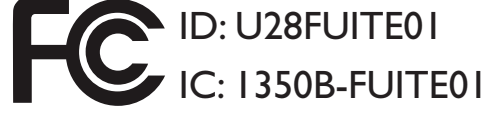

Alet FCC kuralların 15.bölümü ve Kanada Endüstrisinin RSS-210 ile uyumludur.

Uygulama ařađıdaki iki kořula bađlıdır:

1. Alet zararlı parazit oluřturmamalıdır.
2. Alet istenmeyen uygulamalardan kaynaklanan parazitlerde dahil tüm parazitleri almalıdır.

Ekipmanda yapılacak deđiřiklikler ve modifikasyonlar Oticon tarafından net bir řekilde onaylanmadıđı takdirde FCC'nin bu ekipmanı alıřtırmakla ilgili yetkisini geersiz kılar.

Bu vesile ile Oticon bu işitme cihazının tüm gereksinim ve 1999/5/EC direktiflerinde yer alan ilgili hükümlere uyumlu olduğunu ilan eder. Uygunluk beyanı aşağıdaki adresten temin edilebilir:

*Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark*

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
www.hear-it.org
www.oticon.com

CE 0543 0682 



Elektronik ekipmanlara
ait atıklar yerel düzenlemelere
göre atılmalıdır.



NI175

908 62 665 00 / 01.08

Uyarılar

İşitme cihazını kullanmadan önce bu kitapçığı dikkatle okumanız, kullanım bilgilerini ve uyarıları incelemeniz gerekmektedir.

Pillerin yutulması veya yanlış kullanılması tehlike doğurabilir. Bu tip hareketler kalıcı işitme kaybı hatta ölüm gibi çeşitli hasarlara yol açabilir.

- İşitme cihazları ve aksesuarları oyuncak değildir. Bu nedenle çocukların veya yutma riski bulunan kişilerin ulaşamayacakları yerlere kaldırılması kendilerine zarar vermemeleri için gereklidir.
- Bebekler, küçük çocuklar ve öğrenme güçlüğü yaşayan yetişkinlerin önünde asla cihazlarınızın ayarlarını yapmayınız ve pil değiştirmeyiniz.
- Bebekler, küçük çocuklar ve öğrenme güçlüğü yaşayan yetişkinlerin bulunduğu ortamlarda bitmiş pillerin atılması işlemi çok dikkatli yapınız.
- Piller nadiren ilaçlarla karıştırılmaktadır. Yutmadan önce kullandığınız ilaçları pillerle karışma riskine karşın kontrol ediniz.
- Hiçbir zaman cihazı veya pili ağızınıza götürmeyiniz. Düz bir yüzeye sahip oldukları için kayabilirler ve kaza ile yutabilirsiniz.

- İsteğe baęlı olarak Oticon'un birok modeli kurcalanmaya dayanıklı pil yuvası ile saęlanabilir. Bu tip pil yuvası bebekler, kk ocuklar ve ğrenme glğ yařayan yetiřkinler iin tavsiye edilmektedir.

Pil veya cihazı yutmanız halinde acilen doktora bařvurunuz.

İřitme Cihazlarının Kullanımı

- İřitme cihazları bir uzman tarafından tavsiye edildięi ve ayarlandığı takdirde kullanılmalıdır. Yanlıř kullanım ani ve srekli iřitme kaybına yol aabilir.
- Hibir zaman bařkalarının cihazınızı denemesine ve kullanmasına izin vermeyiniz. Yanlıř ve hatalı kullanım kiřinin iřitmesine zarar verebilir.

Pil kullanımı

- Her zaman uzmanınızın tavsiye ettięi marka pilleri kullanınız. Dřk kaliteli piller akabilir ve cihazınızda arıza oluřmasına yol aabilir.
- řarj edilmeyen pilleri asla řarj etmeye alıřmayınız. Pillerin patlayarak ciddi yaralanmalara yol ama riski vardır.
- Pilleri asla yakarak yok etmeye alıřmayınız. Pillerin patlayarak ciddi yaralanmalara yol ama riski vardır.

İşitme cihazının çalışmaması

- İşitme cihazınız pili bittiğinde, hoparlörü kulak kiri ile tıkanıldığında çalışmayacaktır. Trafikte bulunma veya diđer sesleri mutlaka duymanız gerektiđi durumlarda bu olasılıđı aklınızda bulundurmalısınız.

Parazit

- İşitme cihazınız uluslararası standartlar dođrultusunda parazite karşı test edilmiştir. Ancak gelişen teknoloji ile hergün yeni ve cihazlar üzerinde daha önceden beklenmeyen etkiler yaratan ürünler çıkabilmektedir. Örnekler cep telefonu, faks makinası, bilgisayar, mağaza alarm sistemleri, X-ray, Bilgisayarlı tomografi gibi aletleri kapsamaktadır.
- İşitme cihazlarınız Uluslararası Elektromanyetik Uyum standartlarının uyulması gereken koşulları ile uyumludur. Bununla birlikte Epoq işitme cihazı diđer medikal cihazlarla birlikte kullanıldığında parazite neden olabilir. Bu parazitler radyo sinyallerinden, havaalanı metal dedektörlerinden, ve diđer medikal aletlerin elektromanyetik alanlarından ve elektrostatik tahliyesinden de kaynaklanabilir.

Muhtemel yan etkiler

- İřitme cihazı kulak kiri oluřumunu hızlandırabilir.
- Anti-alerjik ürünler kullanımına rađmen çok nadir de olsa ciltte tahriře neden olabilirler.

Bu yan etkilerden herhangi biri oluřtuđunda doktorunuza bařvurunuz.

Filtre sistemi

- Nowax filtre sistemi ile cihaz arasında bořluk olmaması için her zaman kontrol edin.
- İřitme cihazınızda farklı filtre sistemleride bulunabilir. Bunların nasıl deđiřtirileceđi hakkında iřitme cihazı uzmanından bilgi alınız.

Filtre sisteminin kullanımı yada deđiřtirilmesi hakkında sorularınız olduđunda iřitme cihazı uzmanına bařvurunuz.